


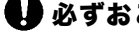


イーストアイ・セーフティーアーム[®]シリーズ セーフティーアーム ロータキャリーUタイプ (品番：RSCU2) 取扱説明書

この度は「イーストアイ・セーフティーアーム ロータキャリーUタイプ」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この「取扱説明書」は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。この「セーフティーアーム ロータキャリーUタイプ」は、屋内・屋外での歩行を補助するための製品（歩行車）です。ご使用前に専門家（医師、理学療法士、介護福祉士、ケアマネージャーなど）にご相談ください。また、長期間ご使用される間に使用者の症状が変わる場合がありますので、定期的に専門家にご相談ください。用具選定の際の適合が十分でなかったり、無理な使用をすることにより、症状の悪化や転倒事故などが起きる原因になります。

【警告表示の説明】

<p>警告表示：  警告</p> <p>この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	<p>警告表示：  注意</p> <p>この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>
<p>図記号：  禁止</p> <p>使用の際に「してはいけない内容(禁止)」を示しています。</p>	<p>図記号：  必ずおこなう</p> <p>使用の際に「必ずお守りいただく内容(実行)」を示しています。</p>


●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

【アームレストについて】

付属された2種類のアームレスト<セパレートアームレスト>と<大型アームレスト>は使用者のお身体に合わせてお選びください。ご使用前に専門家（医師、理学療法士、介護福祉士、ケアマネージャーなど）に、どちらのタイプで使用するかを必ずご相談ください。

セパレートタイプ


特大かごへの荷物の出し入れがスムーズ。
お買い物に便利です。

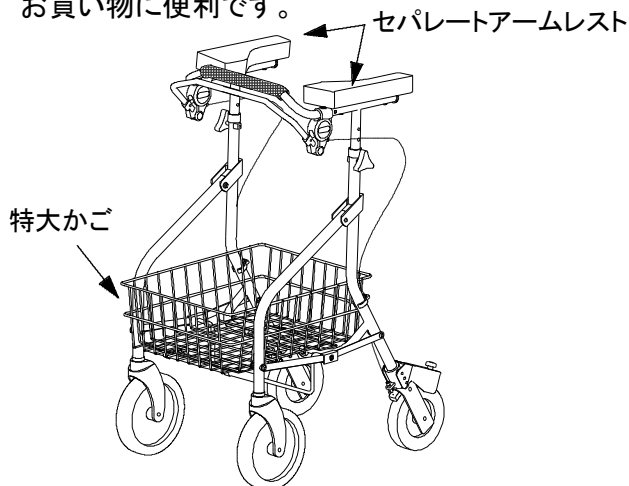

※出荷時はセパレートタイプです。

大型アームレストタイプ

使いやすい位置に前腕部をのせて使用。
片手で使用ができます。

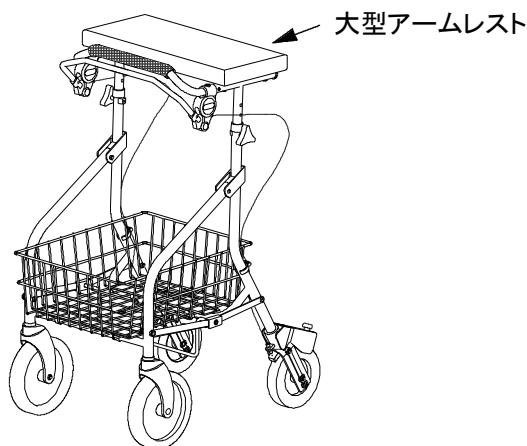

※大型アームレストタイプへの交換方法は、『大型アームレスト取付方法：2頁』をご参照ください。


警告

- 片手で使用する場合は、必ず大型アームレストタイプをご使用ください。
- 前腕部がアームレストからずれることで、バランスがくずれ、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

【目次】

- ・警告表示の説明……………1P
- ・アームレストについて……………1P
- ・各部の名称……………2P
- ・大型アームレスト取付方法…2P
- ・使用条件……………3P
- ・使用上の警告と注意…4～11P
- ・ご使用前の準備……………12～13P
- ・ブレーキの操作方法……………13P
- ・速度調節器の調整方法……………14P
- ・ご使用方法……………15P
- ・折りたたみ収納方法……………15P
- ・ブレーキの点検方法……………16P
- ・ブレーキの調整方法……………17P
- ・ショッピングカゴについて……………17P
- ・お手入れの方法……………17P
- ・お手入れの際のチェックポイント…18～19P
- ・基本仕様……………19P
- ・安全に製品をご使用いただくために…20P

【各部の名称】

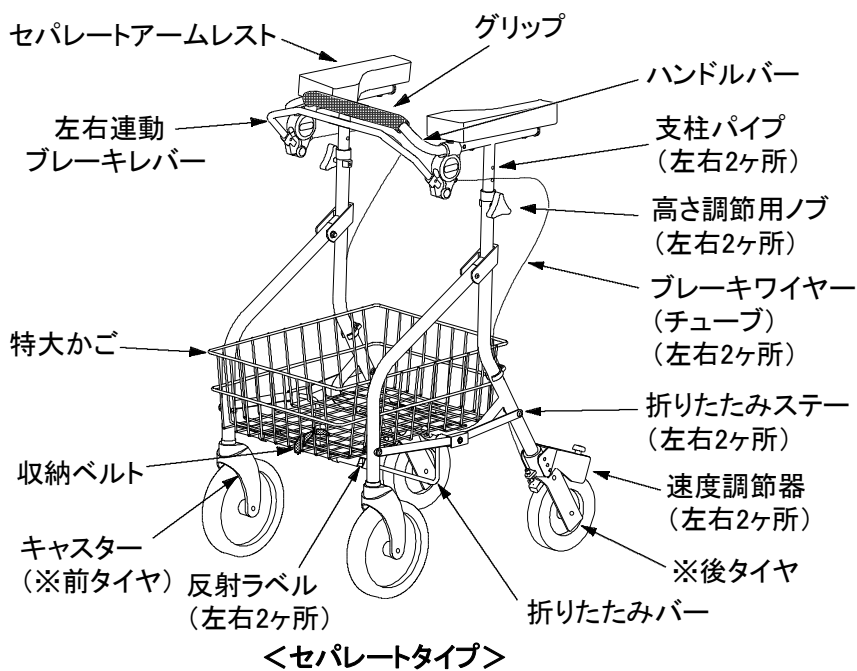

付属品

大型アームレスト

取付け
ネジ+ワッシャー


大型アームレストの取付けについては『大型アームレスト取付方法: 下記』をご参照ください。

※前後タイヤの養生用ラップをはがしてからご使用ください。

【大型アームレスト取付方法】



出荷時はセパレートアームレストが付いています。
大型アームレストタイプで使用する場合は、まずアームレストの交換をしてください。

『1. 左右のセパレートアームレストを取りはずす』

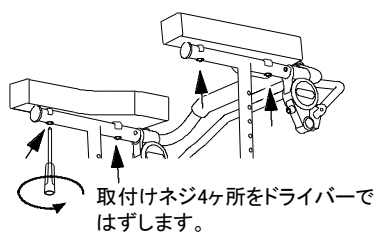

※はずしたアームレストと取付けネジは
なくさないよう大切に保管してください。

『2. 大型アームレストを取付ける』

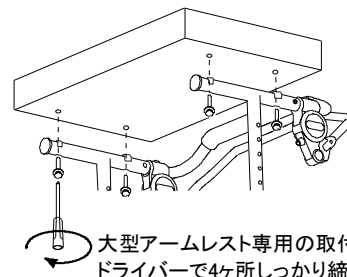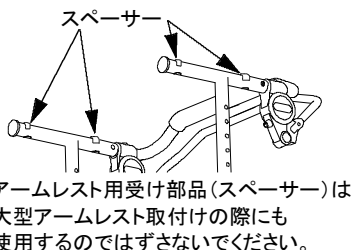

⚠ 警告 ⚠ 注意

- 取付けネジはアームレストにガタつきがでないようしっかり締めつけてください。
- アームレストが不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

【使用条件】

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。



警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

専門家の指示に従う

❗ 必ずおこなう

●この「セーフティーアーム ロレータキャリーUタイプ」は、屋内・屋外での歩行を補助するための製品(歩行車)です。ご使用前に専門家(医師、理学療法士、介護福祉士、ケアマネージャーなど)にご相談ください。また、長期間ご使用される間に使用者の症状が変わる場合がありますので、定期的に専門家にご相談ください。専門家の判断の元、使用する場合は次の警告・注意事項をご確認ください。

○用具選定の際の適合が十分でない場合や、無理な使用をすることにより、症状の悪化や転倒事故などが起きる原因になります。

●この歩行車を片手で使用する場合は、必ず大型アームレストタイプをご使用ください。大型アームレストタイプへの交換方法は『大型アームレスト取付方法:2頁』をご参照ください。

○前腕部がアームレストからずれることで、バランスがくずれ、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

ブレーキ操作ができない方は使わない

⊘ 禁止

●ブレーキの操作ができない方、グリップをしっかりと握ることができない方、前腕で身体を支えることができない方は使用できません。

また、つかまり立ち、伝い歩きができない方は使用できません。

○身体の動きと歩行車の動きがあわないと、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

偏った荷重をかけない

⊘ 禁止

●アームレストへ左右均等に体重をかけることができない方は使用できません。

●特に片手で使用する場合は、片側に偏った荷重がかからないよう前腕をしっかりとのせて、左右均等に体重がかかるよう使用してください。

○偏った力をかけて使用すると、歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

速度調節器をしっかりと調節する

❗ 必ずおこなう

●歩行車がまっすぐに進まない場合(偏った方向に進んでしまう場合)は、速度調節器で左右のバランスを調節してください。

調節方法については『速度調節器の操作方法:14頁』をご参照ください。

○身体の動きと歩行車の動きがあわないと、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

体力や状態に応じて介助の方が付き添う

❗ 必ずおこなう

●使用者の体力や状態、使用場所に応じて、介助の方が付き添いご使用ください。

○誤った使用方法をすると使用者や歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

* 身体の状態により、歩行時に、フレーム、タイヤ、速度調節器などに身体の一部が当たることに気付くことが難しい場合には、必ず介助の方が付き添いご使用ください。

体力に応じて荷物の量を調整する

❗ 必ずおこなう

●使用者の体力や状態、使用場所に応じて、特大かごにのせる荷物の量を減らすなど調整してください。坂道や傾斜面でも不自由なく取り回しができる範囲で荷物の量を調整してください。

* 特に荷物が多くのった状態では、歩行車が傾斜している下方へ動きます。傾斜面で歩行車の制御ができるように使用者の体力に合わせて荷物の量を調整してください。

○転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

ご使用前に各部を点検、メンテナンスする

❗ 必ずおこなう

●製品は使用とともに劣化が進みます。取扱説明書をご参照の上、ご使用前に各部を点検し、メンテナンスしていただきますようお願い申し上げます。

この製品の保証期間はご購入日より1年間です。なお保証期間を超過し、長年ご愛用いただいております製品につきましては、特に注意して定期点検をしてください。

保証期間内、または期間を超過した製品につきましても、製品に異常が見られる場合は、即時に使用を中止し、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問い合わせください。

【使用上の警告と注意】

1. 本製品の使用前に確認すること

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

ブレーキの 作動確認と調整

必ずおこなう

- ご使用前に必ず左右連動ブレーキが正常に作動すること、また、駐車ブレーキをかけた時に、後タイヤがしっかり固定され、手でタイヤが容易に回転しないことをご確認ください。ブレーキを調整してもタイヤの固定ができない場合は『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。
- 後タイヤがすり減るとブレーキの効きが弱くなります。
- 必ずご使用前にブレーキワイヤーに異常がないことを毎回点検ください。高さ調節時などにブレーキワイヤーを無理に引っ張らないようにご注意ください。
- ブレーキワイヤーが傷ついたり、変形してブレーキの効きが悪くなり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。
*『ブレーキの点検方法:16頁』をご参照ください。

支柱パイプは左右 同じ穴位置にセット

必ずおこなう

- 左右の支柱パイプは同じ穴位置(高さ)にセットしてご使用ください。
- アームレストが傾き不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

高さ調節用ノブの 締めつけを確認

必ずおこなう

- ご使用前に高さ調節用ノブのゆるみがないかご確認ください。高さ調節用ノブは使用とともにゆるみが出る場合があります。ゆるみがある場合はブレーキワイヤーをさけて、高さ調節用ノブを締め直してからご使用ください。ブレーキワイヤーがはさまるとうまくノブの締め付けができません。『ご使用前の準備:12頁』をご参照ください。
- 高さ調節用ノブにゆるみがあると、アームレストが不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

アームレストと ハンドルバーの 取付確認

必ずおこなう

- ご使用前にアームレストとハンドルバーがしっかり取付けられていることをご確認ください。アームレスト取付けボルトは使用とともにゆるみが出る場合があります。ゆるみがある場合は締め直してからご使用ください。
- 歩行時にアームレスト、ハンドルバーがはずれて、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

ネジのゆるみを確認

必ずおこなう

- ご使用前にネジやボルトのゆるみがないかご確認ください。タイヤ取付けボルトや各部の取付けネジは、使用とともにゆるみが出る場合があります。ゆるみがある場合は締め直してからご使用ください。
*ネジやボルトを締めつけすぎると、動きが悪くなる場合があります。ネジやボルトを締め直した際に動きが悪くなった場合には、少しだけゆるめるなどして動きを確認してください。
- ネジやボルトのゆるみがあるとタイヤや本体フレームがはずれたり、脱落して歩行車が固定されず不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

注意

誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

指はさみに注意

注意

- 支柱パイプの高さ調節時や歩行車の折りたたみ時に指をはさまないようにご注意ください。
- 折りたたみステーへの指はさみ、巻き込まれにご注意ください。

次の頁に続く

1. 本製品の使用前に確認すること (続き)

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

注意


誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

ガタつきに注意



- 本体に無理な力がかかることで、ガタつきが出る場合があります。ご使用前に必ず、本体にガタつきがないことをご確認ください。ガタつきがある場合は、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。
- 転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

アームレストの確認

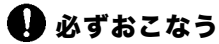

- ご使用前に必ず、アームレストの破れがないこと、グラつきがないことをご確認ください。アームレストに異常が見られる場合は使用せずに、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。

ハンドルバーの確認




- ご使用前に必ず、ハンドルバー、グリップの破損や変形がないことをご確認ください。ハンドルバー、グリップに異常が見られる場合は使用せずに、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。

タイヤのすり減りを確認



- ご使用前に必ず、タイヤ(前・後)のすり減りがないことをご確認ください。タイヤは消耗品です。確認の際にすり減りがひどい場合には、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。
- ブレーキの効きが悪くなる、本体がガタつくなど安定した走行ができなくなる原因になります。

収納ベルトが巻き付けられていることを確認

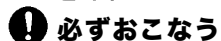

- ご使用前に必ず、収納ベルトが本体フレームと特大かごへ巻き付けられていることをご確認ください。『特大かごの取付:13頁』をご参照ください。
- 収納ベルトが長い状態のまま走行すると、キャスターにからまるなどして走行の妨げとなります。

2. 使用方法についての警告と注意

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

グリップを握って使用



- 歩行時には、前腕をアームレストにのせ、グリップをしっかり握り、常に左右連動ブレーキをかけられる状態でご使用ください。
- *また、片手でブレーキ操作をする際は、ブレーキ操作をしない手がグリップと左右連動ブレーキレバーの間にはさまれないようご注意ください。
- 転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

アームレストに均等に体重をかける



- グリップを握り、アームレストへ左右均等に体重がかかるようご使用ください。アームレストに偏った力をかけて使用しないでください。
- また、片手で使用する場合は必ず大型アームレストタイプへ交換して、使用する前腕を大型アームレストの中心にのせて、偏った力がかからないようご使用ください。
- 偏った力をかけて使用すると、歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

駐車する際は駐車ブレーキをかける



- 歩行車から離れる際は、必ず駐車ブレーキをかけ、歩行車が動かないことを確認してください。
- 歩行車が急に動きだし、通行者にぶつかるなど思わぬ事故の原因になります。

移乗する際は駐車ブレーキをかける



- 歩行車への移乗、または歩行車から移乗する際は、必ず駐車ブレーキをかけてください。また、必要に応じて必ず介助の方が付き添いご使用ください。
- 歩行車が急に動きだし、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

次の頁に続く

2. 使用方法についての警告と注意 (続き)

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

駐車ブレーキを
かけたまま移動しない

 禁止

- 駐車ブレーキをかけたまま、歩行車を移動しないでください。
- 後タイヤが摩耗したり、ブレーキ部品の破損などにより思わぬ事故の原因になります。

急ブレーキをかけない

 禁止

- 急ブレーキはかけないでください。
- 急ブレーキをかけることで上体が前にずれ、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

グリップだけに
体重をかけない

 禁止

- グリップだけに体重をかけないでください。
- グリップだけに体重をかけて使用すると、破損の原因になります。
また、歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

速度調節器を
締めすぎない

 禁止

- 速度調節器を調節する場合は、歩行時にタイヤが回転するよう調節してください。
- タイヤが回転しないぐらいまで速度調節器を調節すると、速度調節器の各部品が破損するなど思わぬ事故の原因になります。

走って使用しない

 禁止

- 歩行車を使用して走らないでください。
速度をブレーキで調整しながらゆっくり歩行してください。
- 歩行車の速度が増して、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

歩行車を前に進め
過ぎない

 禁止

- 使用する際、一度に歩行車を前へ進め過ぎないでください。
歩行車を歩行の速度にあわせてゆっくり進めてください。
- 身体を前に移動させることが困難になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

身体の後ろに置いて
使用しない

 禁止

- 歩行車を身体の後ろに置いて歩行しないでください。
- 転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

折りたたんだ
状態で使用しない

 禁止

- 折りたたんだ状態で使用しないでください。折りたたみステーをしっかりと下げ、特大かごを取付けてからご使用ください。『ご使用前の準備: 12~13頁』をご参照ください。
- 不安定な状態で使用すると、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

ハンドルバー、グリップ、
左右連動ブレーキを
持ち上げない

 禁止

- 歩行車を持ち上げる際や移動する際に、ハンドルバー、グリップ、左右連動ブレーキを持ち上げて移動しないでください。歩行車を持ち上げる際は、左右の前側本体フレームを持ち上げてください。
- 破損やガタつきの原因になります。

体力や状態に応じて
介助の方が付き添う

 必ずおこなう

- 使用者の体力や状態、使用場所に応じて、介助の方が付き添いご使用ください。
- 誤った使用方法をすると使用者や歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。
- * 身体の状態により、歩行時に、フレーム、タイヤ、速度調節器などへ身体の一部が当たることに気付くことが難しい場合には、必ず介助の方が付き添いご使用ください。


3. 使用場所についての警告と注意

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告


誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

公道での使用に注意

 必ずおこなう


- 公道で使用する場合は、歩行車の操作に十分慣れてからご使用ください。状況に応じて必ず介助の方が付き添いご使用ください。歩行車は歩行者として扱われますので、道路歩行時は必ず右側を歩行してください。また車道は歩行せずに、できる限り歩道や幅のある路側帯を歩行してください。
- 車や自転車、他の歩行者などへの接触など思わぬ交通事故の原因になります。

公共の場所での使用に注意

 必ずおこなう


- 公共交通機関(バス、電車)や、店舗などでの使用については、各交通機関や店舗などの指示にしたがいご使用ください。また、車内では、歩行車を使用して歩行しないでください。

坂道、傾斜面での使用に注意

 必ずおこなう


- 坂道や傾斜面での使用には十分ご注意ください。傾斜面で歩行車の制御ができるように使用者の体力に合わせて荷物の量を調整してください。急な坂道や傾斜面では使用しないでください。
- 走行が不安定になり、速度が増して転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。特に荷物を多くのせた状態では、歩行車が傾斜している下方へ動いてしまいます。

介助の方が持ち運びをする


 必ずおこなう

- 階段などでは、必ず介助の方が歩行車を折りたたみ持ち運びしてください。特大かごに荷物をのせている場合は、一度特大かごを外し、本体を折りたたみ持ち運びしてください。その後、特大かごを持ち運びしてください。高い場所への出し入れ、車などへの積み下ろしは、必ず介助の方がおこない、使用者ご自身での持ち運びはしないでください。
- 使用者が転倒する、歩行車が転倒、転落するなどにより思わぬ事故の原因になります。

溝や段差に注意

 必ずおこなう

- 踏切の線路の溝や道路の側溝などの溝にご注意ください。溝に対して左右前タイヤの向きを直角方向にそろえてから歩行してください。また、大きな溝は避けてください。
- 溝にタイヤがはまって動けなくなり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

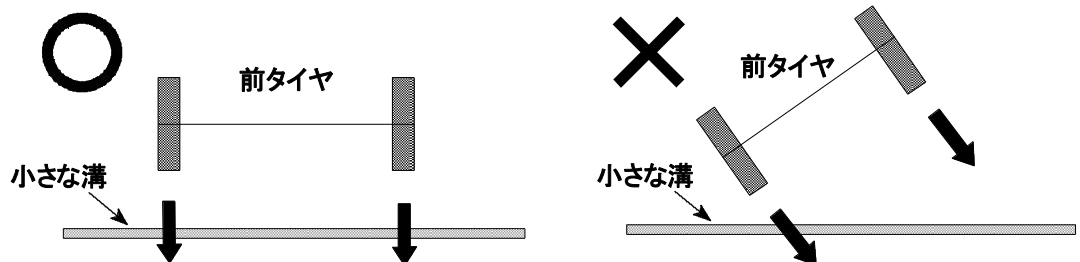

- 縁石など小さな段差をのり越える際は十分ご注意ください。段差にキャスターを強くぶつけるなどして無理に段差をのり越えないでください。
- 使用者がバランスを崩して転倒する、または繰り返しキャスターに衝撃が加わると、本体フレームやキャスターが変形、破損するなど思わぬ事故の原因になります。

視界が悪い場合は使用しない

 禁止

- 視界が悪い場合は使用しないでください。また、夜間などに使用する場合は、必ず介助の方が付き添い、十分注意してご使用ください。
- 転倒や他の通行物への衝突など思わぬ事故の原因になります。

階段・エスカレーターなどで使用しない

 禁止

- 階段やエスカレーター、動く歩道などで使用しないでください。
- 使用者が歩行車においていかれるなどにより転倒や転落などの思わぬ事故の原因になります。

次の頁に続く

3. 使用場所についての警告と注意 (続き)

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

路面状況が悪い
場所で使用しない

 禁止

●芝生などの滑りやすい場所や、ぬかるみ、砂利道、でこぼこ道などの悪路では使用しないでください。また、屋内で使用する場合でも、濡れた床、タイル面や、毛足の長いじゅうたん、ござなどの敷物の上では使用しないでください。

○転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

浴室内で使用しない

 禁止

●浴室内で使用しないでください。

○転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。また、浴室内の水分により金属部分のサビや、樹脂部の劣化を早める原因になります。

注意

誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

屋内での使用に注意

 注意

●屋内で使用する際は、敷物(じゅうたん等)にご注意ください。
○敷物にタイヤや足をとられて、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

●一般家庭など、屋内の限られたスペースで歩行車を使用する場合、歩行車が壁や家具などに当たる、ぶつかる、こすれる場合がありますのでご注意ください。
ご使用の際に歩行車が壁や家具にぶつかる場合は、介助の方が付き添われるか市販のゴムシートなどで壁や家具を保護してご使用ください。
○歩行車本体が破損したり、壁・家具などがキズついたりする原因になります。

店舗などで
使用する際の注意

 必ずおこなう

●店舗などで使用する際は、店舗用の「ショッピングカゴ」の使い方や、レジなど通路が狭く、本製品が通行できない場合なども含め、店舗のルール、指示にしたがいご使用ください。

●店舗用の「ショッピングカゴ」をのせたまま店舗を出ないでください。
店舗用の「ショッピングカゴ」は必ず返却し、荷物を特大かごに移し替えてください。

●店舗などで使用する際は、他のお客様や商品、設備に接触しないように、十分に注意してください。

* 店舗内でのトラブルにつきましては、弊社では責任を負いかねます。

交通量の少ない
場所で使用

 注意

●交通量の多い場所では使用を避けるか、介助の方が付き添いご使用ください。

○通行者と接触し転倒によるケガなど思わぬ交通事故の原因になります。

ブレーキワイヤーに
注意

 注意

●ご使用の際に、ブレーキワイヤーが周囲の物に引っかからないようにご注意ください。

○ブレーキワイヤーが傷ついたり、変形してブレーキの効きが悪くなり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。


4. 特大かごの使用についての警告と注意

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

体力に応じて
荷物の量を調整する

 必ずおこなう

- 使用者の体力や状態、使用場所に応じて、特大かごにのせる荷物の量を減らすなど調整してください。
- 坂道や傾斜面でも不自由なく取り回しができる範囲で荷物の量を調整してください。
- *特に荷物を多くのせた状態では、歩行車が傾斜している下方へ動きます。
- 傾斜面で歩行車の制御ができるように使用者の体力に合わせて荷物の量を調整してください。
- 転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

特大かごに
荷物をのせすぎない

 禁止

- 特大かごに荷物をのせすぎないでください。
- *特大かごの最大積載量は、15kgです。
- 高さ調節用ノブの高さよりも荷物を高く積まないでください。
- 偏って荷物を積まないでください。
- 特大かごが破損したり、歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

特大かご以外に
荷物をのせない

 禁止

- ハンドルバーに荷物をぶら下げるなど、特大かご以外に荷物をのせないでください。
- 荷物が落下して破損したり、落下した荷物でケガをするなど思わぬ事故の原因になります。
- また、歩行車が不安定になり、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

特大かごの上に
のらない、
人をのせない

 禁止

- 特大かごは荷物専用のかごです。
- 特大かごの上にのらないでください。また、特大かごに人(幼児や子供を含む)のをせて移動しないでください。
- 特大かごからの転落によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

注意

誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

特大かごの取付けを
確認

 必ずおこなう

- 特大かごには前後があります。特大かごの前側ラベル(裏面貼付)が貼られている方が本体前側にきていることをご確認ください。
- 特大かご固定用フックと収納ベルトが本体にしっかりと取付けられていることをご確認ください。『特大かごの取付:13頁』をご参照ください。
- 使用中に特大かごがずれ荷物が散乱してつまずき、荷物が破損する、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

荷物の積み下ろしの際
は駐車ブレーキを
かける

 注意

- 特大かごに荷物をのせたり下ろす際は、駐車ブレーキをかけ歩行車が動かないことを確認してください。
- 駐車ブレーキが正常に作動しても、敷物(じゅうたんやたたみ)などによっては歩行車が動いてしまう場合があります。その場合は、特大かごに荷物をのせる、下ろす動作をおこなわないでください。
- 歩行車が急に動きだし、転倒するなど思わぬ事故の原因になります。

坂道で荷物の積み
下ろしをしない

 注意

- 斜面や坂道では、荷物をのせたり下ろしたりしないでください。
- 歩行車が急に動き出し、転倒するなど思わぬ事故の原因になります。

店舗などで
使用する際の注意

 必ずおこなう

- 店舗などで使用する際は、店舗用の「ショッピングカゴ」の使い方や、レジなど通路が狭く、本製品が通行できない場合なども含め、店舗のルール、指示にしたがいご使用ください。
- 店舗用の「ショッピングカゴ」のをせたまま店舗を出ないでください。
- 店舗用の「ショッピングカゴ」は必ず返却し、荷物を特大かごに移し替えてください。

次の頁に続く

4. 特大かごの使用についての警告と注意 (続き)

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

注意

誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

「ショッピングカゴ」をのせる際の注意

注意

- 店舗などで店舗用の「ショッピングカゴ」を特大かごにしっかり収まるようにのせてください。『ショッピングカゴについて:17頁』をご参照ください。
- 「ショッピングカゴ」が特大かごに入らず、はみ出た状態で使用すると歩行による振動などで「ショッピングカゴ」が不安定になり、「ショッピングカゴ」が落下する原因になります。

荷物ののせ方についての注意

注意

- 荷物はゆっくりとのせてください。
- 歩行車自体が転倒するなど、荷物の破損や歩行車の破損の原因になります。
- 背の高い容器を置いた場合は、容器の横倒れに注意してください。なるべく背の低いフタ付きの容器をご使用ください。また、ペットボトルなどは必ずフタを締めて置いてください。
- 歩行車が動いた振動によって容器が倒れて荷物の破損の原因になります。
- ペット(生き物)などを入れないでください。
- 特大かごからのり出して落下するなど思わぬ事故の原因になります。
- 特大かご、ショッピングカゴに入れた荷物の紛失や破損、変形にご注意ください。また、貴重品や破損しやすいものはのせないでください。
- 特大かご、ショッピングカゴに入れた荷物の紛失や破損、変形などにつきまして、弊社では責任を負いかねますので、のせ方に十分ご注意ください。

5. 修理、改造についての警告

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

警告

誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

交換修理について

- グリップ、タイヤ、ブレーキワイヤーなどは交換修理ができます。傷や摩耗、変形などが見られる場合は交換修理をおすすめします。交換修理につきましては、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。

パイプを曲げ戻さない (修理の禁止)

禁止

- 歩行時に脚先が溝や穴にはまり、転倒するなどして大きな力がかかった場合に、パイプが曲がる場合があります。このときにパイプを元の状態に曲げ戻さないでください。
*パイプに変形、異常が現れた場合には、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。
- アルミパイプの性質上、一度曲がったパイプを曲げ戻して使用すると、徐々にパイプに亀裂が入り使用中に突然折れて、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

改造をしない

禁止

- 本体に穴を開けたり、他の部品を取付けたり、他の部品に取替えるなどの改造は絶対にしないでください。
- 改造された製品は強度や安定性などの保証はできません。また、改造された製品に不具合が起きても弊社での修理対応はできません。

異常が現れた時には (修理の禁止)

禁止

- 『お手入れの際のチェックポイント:18~19頁』をご参照の上、ご使用前に各部を点検してください。万一、製品に破損、変形などの異常が現れた場合は、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。
*お客様ご自身で修理を行った場合、弊社での修理対応ができなくなる場合があります。

6. 保管・保安上の注意

●は使用に際しての、具体的な警告・注意・確認事項を表記しています。
○は●の事項を守らず使用した場合に起こりうる結果を表記しています。

注意

誤った取扱いをすると、使用者が、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

折りたたみ状態での注意

注意

- 折りたたみ状態で置く場合は、駐車ブレーキをかけ、歩行車が倒れないように壁などに立てかけてください。
- 歩行車本体の転倒により、そばにいる方がケガをされたり、歩行車や、周囲の物の破損など思わぬ事故の原因になります。

保管時の注意

注意

- 使用しない時は折りたたみ、収納保管してください。また、幼児や子供の手の届くところには放置しないでください。
- 通行する人が歩行車につまずいて転倒したり、誤って踏まれると変形、破損する原因になります。また、この歩行車で幼児や子供が遊ぶと、指、頭をはさむ、転倒してケガをするなど思わぬ事故の原因となります。

直射日光に注意

注意

- 保管時は、直射日光の当たらない屋内に収納保管してください。
- 屋外に放置するとサビや紫外線による金属、樹脂、ゴムの劣化が進行しやすくなる原因になります。

保安上の注意

注意

- 非常口や消火器、消火栓の前には放置しないでください。
- 緊急時の避難や救助の妨げになります。

火のそばに置かない

禁止

- 歩行車を火(暖炉、ストーブ、ファンヒーターなど)のそばに置かないでください。
- パイプに触れてやけどをしたり、グリップや樹脂部分などが溶けて使用できなくなる恐れがあります。

幼児や子供に注意

注意

- 幼児や子供は思わぬ行動をする場合があるため、この歩行車に近づけないよう十分にご注意ください。
- この歩行車は折りたたみができる構造ですので、幼児や子供がいたずらをしたりすると、指などをはさんだりしてケガをするなど思わぬ事故の原因となります。また、この歩行車で遊んだりすると、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

濡れたまま放置しない

禁止

- 屋外で使用し、突然の雨や水はねなどにより濡れた場合は、ご使用後に乾いた布で水気を拭き取り、乾燥させてください。また、屋内での使用でも、飲み物がこぼれる、消毒液がかかるなどして濡れた場合も、すぐに拭き取り、乾燥させてください。『お手入れの方法:17頁』をご参照ください。
- 濡れたまま放置すると、金属部分がサビたり、樹脂部品の劣化(退色、亀裂)が進行しやすくなる原因になります。薬品などがかった場合、薬液の影響などで金属部分や樹脂部の劣化が早期に進行する可能性があります。定期的に点検していただき、異常が見られる場合は使用を中止して『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。

乱暴な取扱いはしない


禁止

- 「歩行車を倒す」などの乱暴な取扱いはしないでください。また、「高いところから落とす」「壁や段差にぶつける」など、繰り返し強い衝撃が加わるような使い方はしないでください。
- パイプが変形して歩行車がガタつき、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。また、繰り返し強い衝撃が加えられると、樹脂部分などに破損を生じる恐れがあります。

【ご使用前の準備】

『 1. 梱包箱から取出します。』

- ① 本体、特大かご、大型アームレストが梱包されていることをご確認ください。

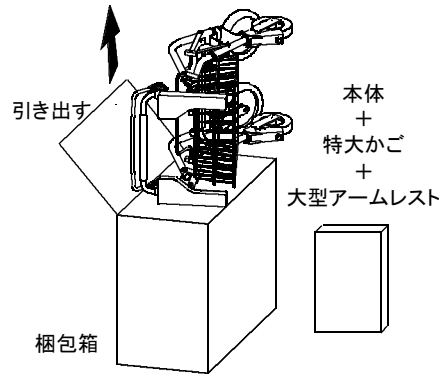


大型アームレストを取出してから、本体を特大かごと一緒に引き出してください。

⚠ 注意


- 無理に引き出すとキズや破損の原因になります。

* 製品はポリ袋に梱包されています。

『 2. 本体フレームを開きます。』

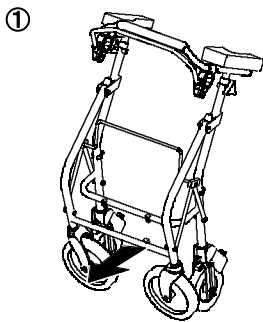


- ① 前脚フレームを手前に引き、本体フレームを開きます。

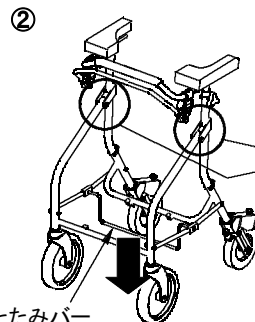

- ② 折りたたみバーを下に押し下げ、しっかりと本体フレームを開きます。

⚠ 指はさみ注意

指はさみ注意シール

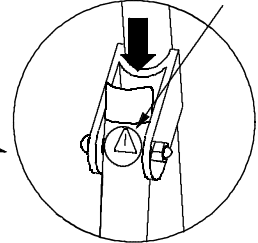

⚠ 注意

「前脚フレーム接続部拡大図」

- 開閉操作時の指はさみにご注意ください。
- 折りたたんだ状態で使用しないでください。

『 3. 使用するアームレストを選択します』 * 出荷時はセパレートアームレストが付いています。


・セパレートタイプで使用する場合はこのまま『 4. アームレストの高さ調節』へお進みください。

・大型アームレストタイプで使用する場合は、『大型アームレスト取付方法:2頁』をご参照の上、交換をおこない、『 4. アームレストの高さ調節』へお進みください。


『 4. アームレストの高さ調節』

⚠ 指はさみ注意

- ① 本体左右の高さ調節用ノブをゆるめ、取外します。

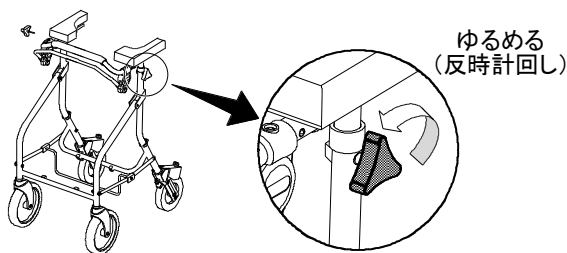


- ② 使用しやすい高さに支柱パイプの穴位置を本体外側取付け穴に合わせます。

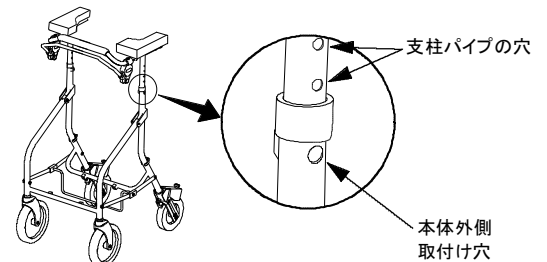

⚠ 注意

- 左右の支柱パイプは、同じ穴位置(高さ)にセットしてください。
- 高さ調節用ノブを本体外側取付け穴からしっかりと締めつけてください。

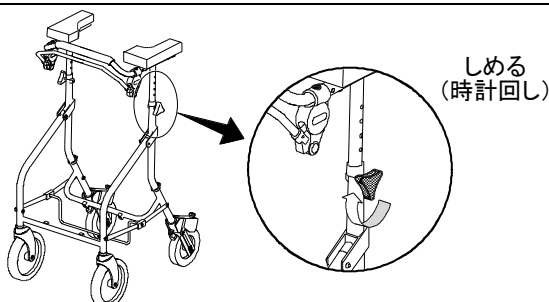


- ③ 高さ調節用ノブを本体外側の取付け穴から差し込み、しっかりと締めつけます。

⚠ 注意

- ブレーキワイヤーチューブをはさまないように、高さ調節用ノブを本体外側の取付け穴へしっかりと締めつけてください。

『 5. 特大かごの取付 』


＜特大かご＞
(真上から見た図)

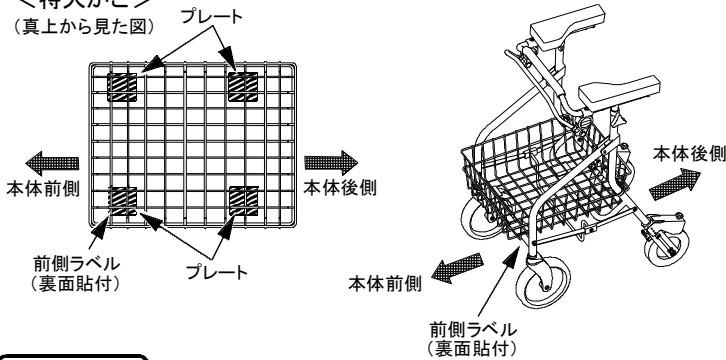

⚠ 注意


- 特大かごの前側ラベル(裏面貼付)が貼られている方が本体前側に来るように取付けます。

特大かご固定用フック
(前後4カ所)

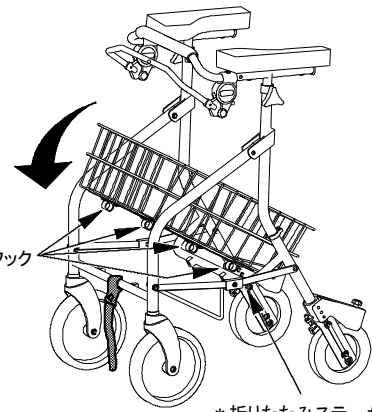


* 折りたたみステーが下に押し下げられ、本体が完全に開いていることをご確認ください

- ①特大かご固定用フック(前後4カ所)を本体の受けパイプにのせます。

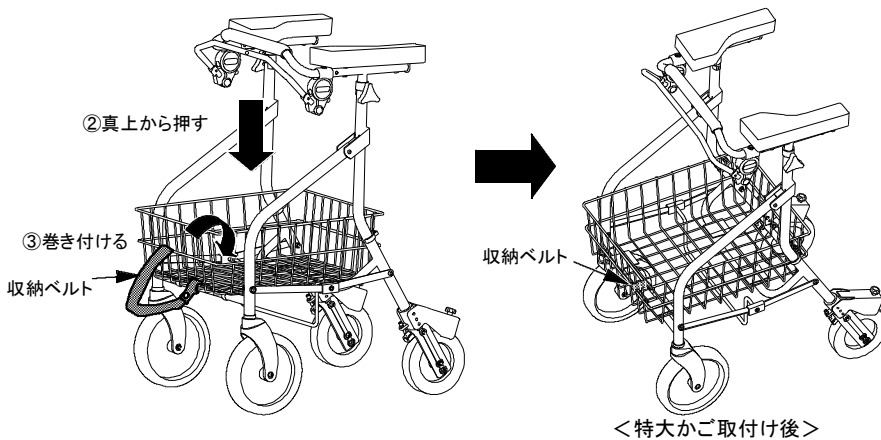

- ②特大かごを真上から押し、特大かご固定用フック(前後4カ所)を本体受けパイプにしっかりとはめ込みます。
- ③収納ベルトを特大かごのフレームに巻き付け固定します。

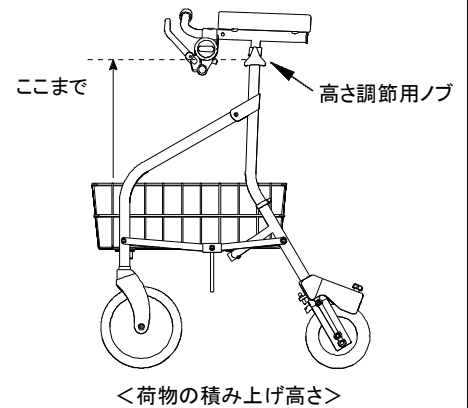


⚠ 注意

- 特大かごに荷物をのせすぎないでください。また、荷物を偏らせて積まないでください。特大かごの最大積載重量は、15kgです。高さ調節用ノブよりも荷物を高く積み上げないでください。

【ブレーキの操作方法】


1. 左右連動ブレーキの操作方法

グリップをしっかりと握りながら、左右連動ブレーキを握り、握る力を調整しながらブレーキをかけ、歩行車の速度を調節します。

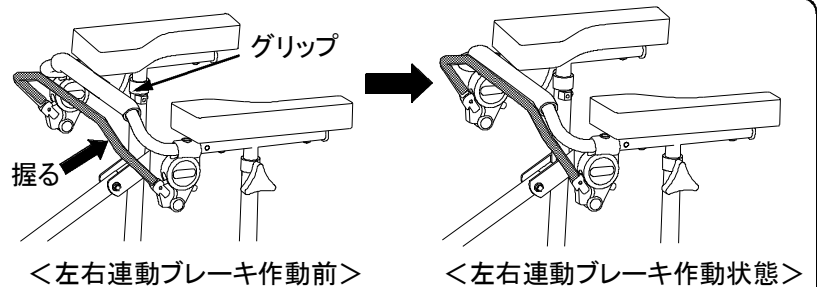

2. 駐車ブレーキの操作方法

左右連動ブレーキ“カチッ”と音がするまで下に下げると左右連動ブレーキが止まり、後タイヤがロックされます。左右連動ブレーキを上を握るとロックが解除されます。

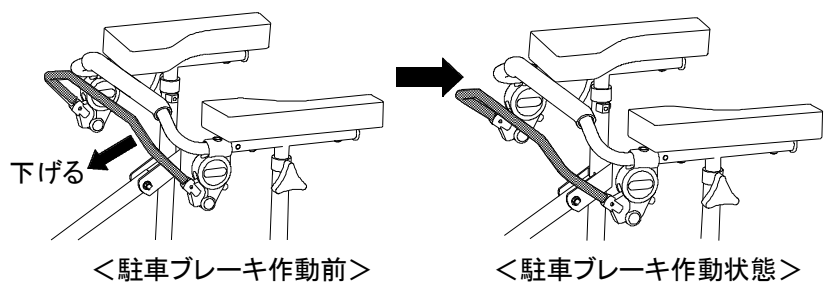


【速度調節器の操作方法】

⚠ 警告

- ご使用される方の状態により、後タイヤに負荷をかけて、本体の走行速度を抑えることができます。また、歩行車がまっすぐに進まない場合（偏った方向に進んでしまう場合）は、まっすぐ進めるよう速度調節器で左右のバランスを調節してください。速度の調節につきましては、必ず専門家にご相談の上、調節してください。
- 調節が不十分のまま使用すると製品の破損や転倒など、思わぬ事故の原因になる場合があります。


速度調節器の調節方法

ローラーアジャスターを”強”の方向に回すとローラーが後タイヤにあたりタイヤの回転が重くなります。反対に”弱”の方向に回すと、ローラーが後タイヤから離れタイヤの回転が軽くなります。

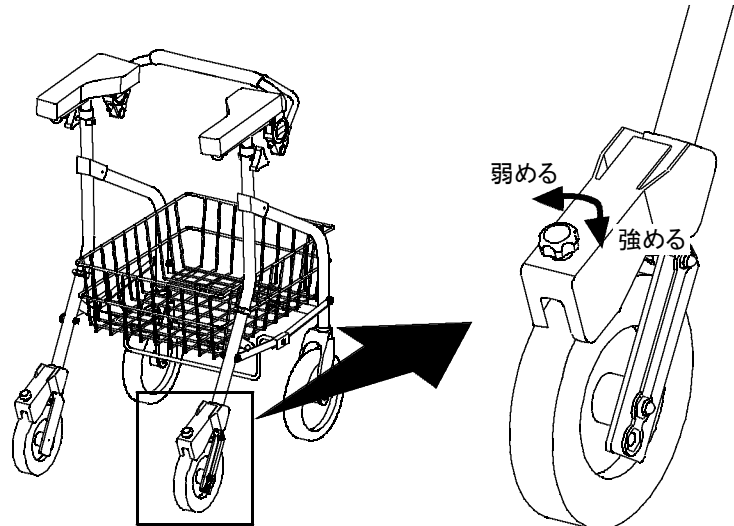


❗必ずおこなう

- ・速度調節をする場合は、速度調節器後方から、ローラーと後タイヤの状態を確認しながら、調節をおこなってください。
- ※初期状態では、ローラーアジャスターがゆるめてある状態で、ローラーと後タイヤにスキマがあります。

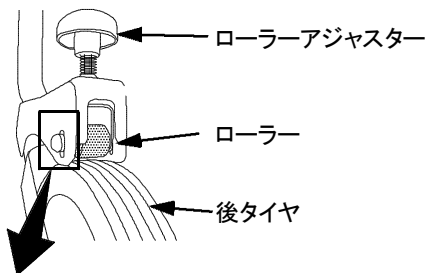

速度調節器の調節目安について

- ・速度調節器を作動させる場合には、使用される方の状態によって適切な位置でご利用ください。

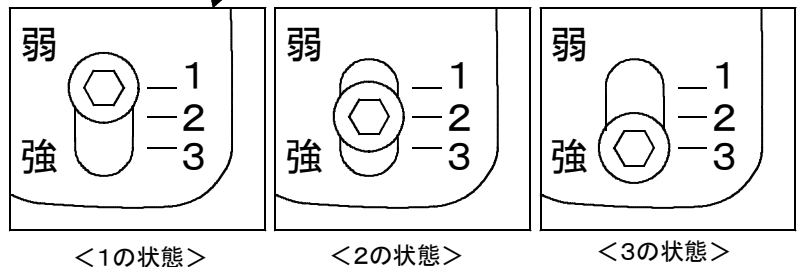

❗必ずおこなう

- 速度調節器を調節する場合は、歩行時に後タイヤが回転する程度に調節してください。
- 後タイヤが回転しないぐらいまで速度調節器を調節すると、ローラーやローラーアジャスターなどが破損するなど思わぬ事故の原因になります。
- 左右の速度調節器は個別に、調節をしてください。
- 左右のタイヤ、ローラー部分の多少の表面の異なりや、角度の違い、摩耗などの状態により、左右の速度調節器の数字が同じでも抵抗負荷が異なります。
- 歩行する際に速度の調節を必要としない場合は、<1の状態>にし、ローラーと後タイヤとの間にスキマをあけてください。
- 後タイヤとローラーの摩耗を早める原因となります。


⚠ 注意

- ローラーアジャスターをゆるめる方向に回して、タイヤとローラーにスキマがあき、ローラーアジャスターが回せなくなったら、それ以上ローラーアジャスターをゆるめる方向に回さないでください。
- 速度調節器の各部品が破損する原因となります。

【ご使用方法】

* ご使用前にタイヤ養生用ラップをはがしてあることを再度ご確認ください。

下の②～④までの動作を繰り返し、少しずつ歩行してください。
『ブレーキの操作方法: 13頁』もあわせてご確認ください。

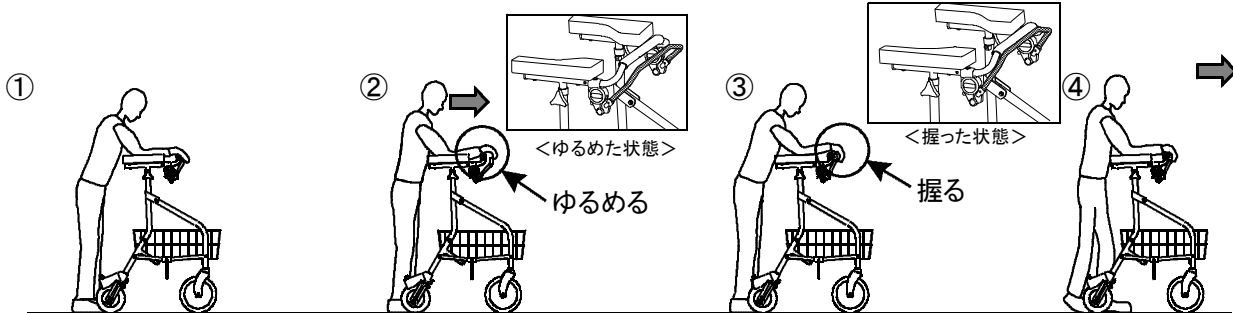

- ① ハンドルバーのグリップと左右連動ブレーキを握り、前腕をアームレストの上ののせます。
- ② ブレーキをゆるめて、前腕で歩行車を軽く押すように前へ動かします。
- ③ 左右連動ブレーキをしっかりと握り、歩行車を確実に停止させます。
- ④ ブレーキを作動させたまま身体を少しずつ前に移動します。

❗ 必ずおこなう

- 歩行時には、前腕をアームレストにのせ、ハンドルバーのグリップをしっかりと握り、常に左右連動ブレーキがかけられる状態にてご使用ください。
- ハンドルバーのグリップを握らないで使用すると、バランスをくずして転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。


【折りたたみ収納方法】

⚠ 注意 * 折りたたむ前に、特大かごを取りはずしてください。

- 使用者の状態により、折りたたみ収納操作、持ち運びなどが難しい場合は、必ず介助の方が対応してください。
無理に操作をおこなうと、使用者が身体のバランスを崩して、転倒によるケガなど思わぬ事故の原因になります。

1. 駐車ブレーキをかけ、折りたたみバーの引きひもを上へ引き上げ、本体フレームをたたみます。

* 一度手前に歩行車を少し引き、キャスターの向きをまっすぐにそろえると、本体フレームが折りたたみしやすい状態になります。

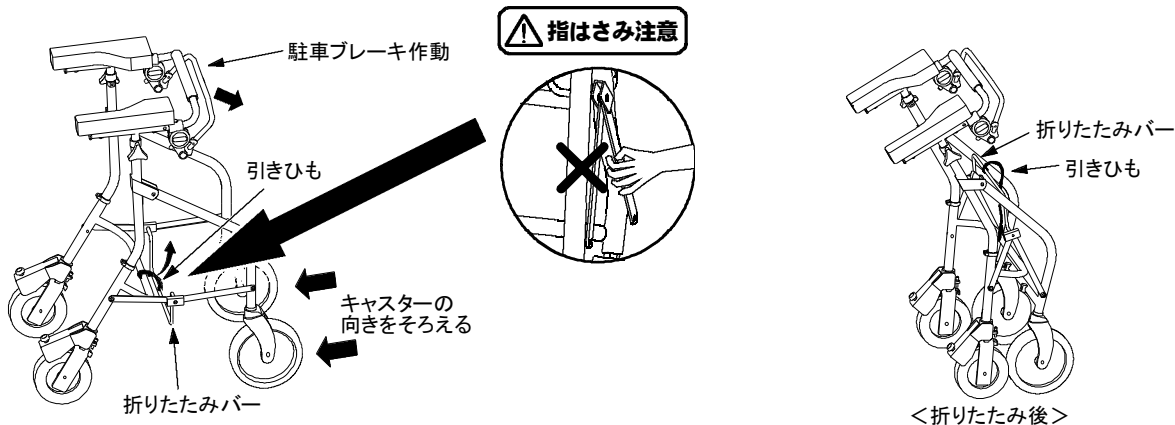


⚠ 注意

- 折りたたみステーを握らないでください。開閉操作時の指はさみにご注意ください。
- 折りたたんで保管する場合は歩行車の転倒にご注意ください。

2. 収納ベルトを長い状態にし、後方パイプに下から巻き付け固定します。

⚠ 注意

- 収納ベルトを強く引っ張らないでください。
- 収納ベルトで固定した状態で無理に本体を開かないでください。
- 収納ベルトが破損するおそれがあります。

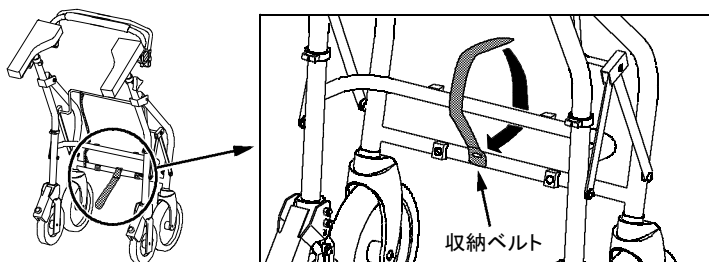

【ブレーキの点検方法】 ❶必ずおこなう 使用者、介助者、レンタル事業者様へのお願い。



警告


誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

【ブレーキ点検についての注意】 安全のために、必ずお守りください！

ブレーキに関する下記の①～④までの項目については、**使用前に必ず毎回点検をおこない**ブレーキが正常に作動することをご確認ください。駐車ブレーキを作動させてもタイヤが動く場合などブレーキに異常が見られる場合は、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問合せください。

***ブレーキワイヤーは安全のため、必ず1年に一度定期的に点検してください。**


①左右連動ブレーキ

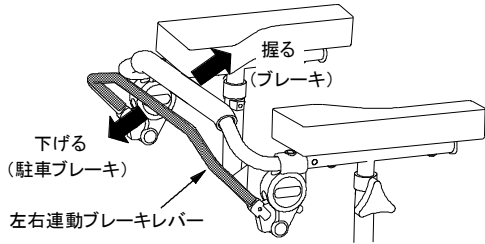

警告 ❶必ずおこなう

左右連動ブレーキレバーを握り、ブレーキを作動させ後タイヤが動かないことをご確認ください。
次に、左右連動ブレーキレバーを下げて駐車ブレーキを作動させ、後タイヤが動かないことをご確認ください。
左右2カ所とも必ずご確認ください。
『ブレーキの操作方法:13頁』をご参照ください。


②後タイヤ・フォーク・取付けボルト

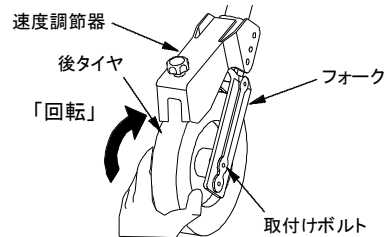

警告 ❶必ずおこなう

ブレーキをかけても後タイヤが回転する場合、タイヤのすり減りの可能性があります。調整方法にしたがい調整をお願いします。
『ブレーキの調整方法:17頁』をご参照ください。次に、タイヤが滑らかに回転すること、フォークと速度調節器に変形や破損がないこと、取付けボルトにゆるみがないことを、左右2カ所とも必ずご確認ください。
*定期的に車軸部には注油してください。
*タイヤに油がついた場合はふき取りしてください。

③ブレーキパッド左右2ヶ所

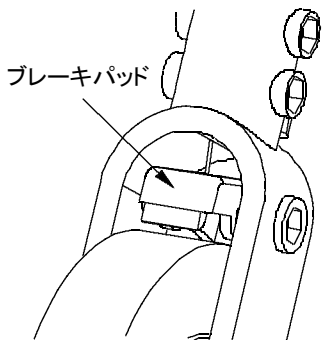


※説明のため速度調節器はイラストから除いています。

警告 ❶必ずおこなう

②でブレーキを調整しても、正常に作動しない場合、ブレーキパッド周囲にゴミや髪の毛などの異物のからまりがないかご確認ください。異物などがからんでいる場合は取り除き、ブレーキパッド可動軸部に注油してブレーキパッドの動きを確認してください。

*定期的にブレーキパッド可動軸部に注油してください。
*ブレーキパッドのタイヤ接合面や、タイヤに油がついた場合はふき取りしてください。

④ブレーキワイヤー固定ネジ、エンドキャップ・ブレーキワイヤー(チューブ)左右2ヶ所

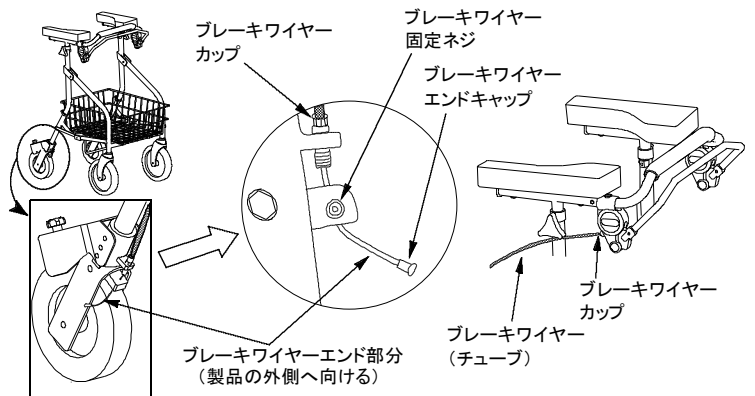

警告 ❶必ずおこなう


②③をおこなってもブレーキが正常に作動しない場合、ブレーキワイヤーやチューブの劣化、チューブの両端がブレーキワイヤーカップにはまっていない、またはブレーキワイヤー固定ネジのゆるみがあるなどの可能性があります。ブレーキワイヤーやチューブに劣化がないこと、チューブの両端がブレーキワイヤーカップにはまっていること、ブレーキワイヤー固定ネジが確実に締めつけられていることを確認後、ブレーキワイヤーがブレーキパッドにしっかり固定されていることをご確認ください。また、ブレーキワイヤーエンド部分が外側に向いていること、ブレーキワイヤーエンドキャップが付いていることをご確認ください。ブレーキワイヤーなどに異常が見られる場合は、即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問い合わせください。

【ブレーキの調整方法】

ブレーキが解除されていること、速度調節器が作動していないことを確認し、大型アームレストの高さを一番低い位置にして調整してください。

調整ネジを抑えながら、ナットを左右に回して、タイヤとブレーキパッドのスキマを調整します。ナットを右に回すとスキマが小さく(－)なり、左に回すと大きく(＋)なります。

ブレーキを解除した状態でタイヤに引っかかりがないこと、駐車ブレーキをかけ、後タイヤを手で持ち、容易にタイヤが回転しない状態に固定されることをご確認ください。

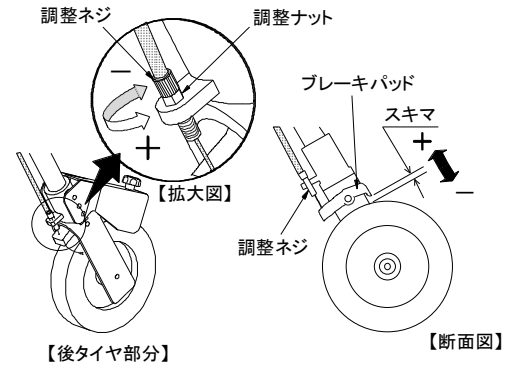


⚠ 注意

- ブレーキの調整をしてもタイヤが固定されずブレーキが作動しない場合は、タイヤのすり減りやブレーキパーツの破損などの可能性があります。使用を中止して『アフターサービスのお問い合わせ先: 20項』または発売元までお問い合わせください。

【ショッピングカゴについて】

特大かごに「ショッピングカゴ」をのせて使用することができます。店舗にて使用する場合には、店舗の指示にしたがい、「ショッピングカゴ」をご使用ください。

『使用上の警告と注意: 7～8頁』の「3.使用場所についての警告と注意」と『使用上の警告と注意: 9～10頁』の「4.特大かごの使用についての警告と注意」をご参照ください。

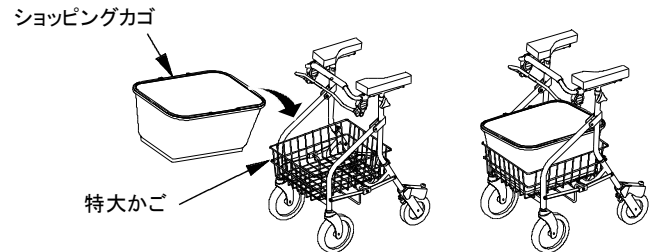

⚠ 警告 ⚠ 注意

- ショッピングカゴをのせる際は、必ず駐車ブレーキを作動させてからのせてください。
- 特大かごの最大積載重量は15kgです。15kg以上の荷物は特大かごにのせないでください。
- 高さ調節用ノブよりも高い位置まで荷物を積み上げないでください。

【お手入れの方法】

- * 汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞り、ふき取りしてください。汚れのふき取り後は、乾いた布で水気をふき取り乾燥させてください。
- * タイヤの動きをスムーズにするため、定期的に車軸部に市販の自転車用機械油などを注油してください。

お手入れの際の注意

⚠ 注意

- お手入れの際にケガなどには十分ご注意ください。
- シンナーやベンジン、塩素系洗剤などは使用しないでください。樹脂部分やグリップゴムが溶け、変形する恐れがあります。
- 金ブラシ・たわしなどは使用しないでください。アルミパイプ、その他樹脂部分がキズつきます。
- フレームの一部・ボルト・ナット・カシメなどはスチール製です。定期的に市販の防錆油などで、サビ止め処置をしてください。
- 車軸部に注油する際は、タイヤやブレーキパッドに油が付着しないようご注意ください。ブレーキの性能が著しく低下する恐れがあります。
- 本体や、パイプの各溶接部にキズや亀裂がないかを定期的にご確認ください。

【お手入れの際のチェックポイント】



警告


誤った取扱いをすると、使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

- 歩行車は使用とともに劣化が進みます。この取扱説明書をご参照の上、定期的の下図の部分を中心に歩行車の各部を点検してメンテナンスをしていただきますようお願い申し上げます。
- この歩行車の保証期間は、ご購入日より1年間です。
なお保証期間を経過し、長年ご愛用いただいている歩行車につきましても、特に注意して定期点検をしていただき、『アフターサービスのお問い合わせ先:20項』または発売元までお問い合わせください。

＜消耗部品について＞







グリップ、タイヤ、ブレーキ関連部品、特大かご、ネジ、ナットなどは消耗部品です。
定期的な点検をしていただき、メンテナンスの際に摩耗や劣化、破損などがある場合は交換してください。

※イラストはセパレートタイプです

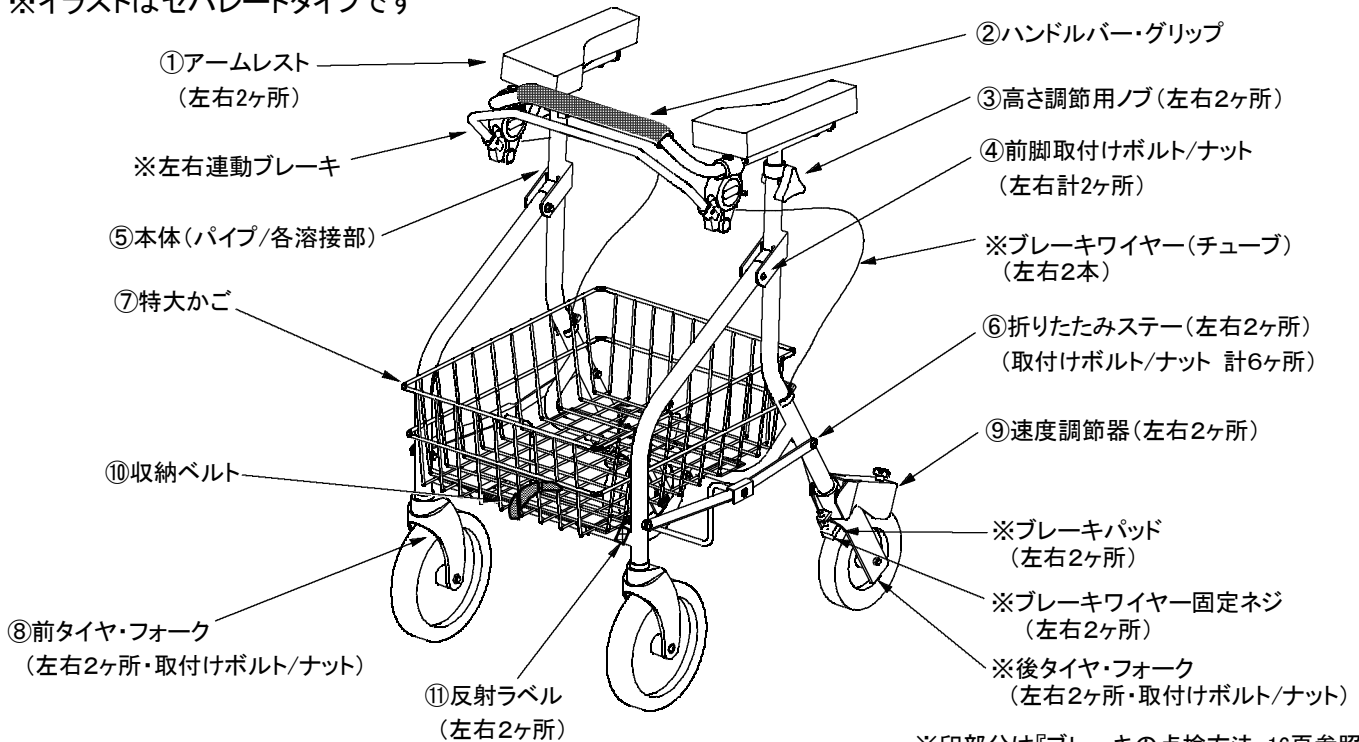

※印部分は『ブレーキの点検方法:16頁参照』

<p>①アームレスト</p> <p>アームレスト</p> <p>使用しているアームレストに破れないこと、ガタつきがないことをご確認ください。</p>	<p>②ハンドルバー・グリップ</p> <p>グリップ ハンドルバー</p> <p>グリップに破れないこと、簡単に回転しないことをご確認ください。ハンドルバーに変形や破損がないことをご確認ください。</p>
<p>※イラストはセパレートアームレストです</p> <p>③高さ調節用ノブ</p> <p>ブレーキワイヤーチューブ 高さ調節用ノブ</p> <p>高さ調節用ノブがしっかり締めつけられることをご確認ください。 *ブレーキワイヤーチューブが本体フレームの外側に来ていることを確認してから高さ調節用ノブを締めつけてください。</p>	<p>④前脚取付けボルト/ナット</p> <p>前脚取付けボルト</p> <p>前脚取付けボルト・ナットにゆるみがないことをご確認ください。</p>
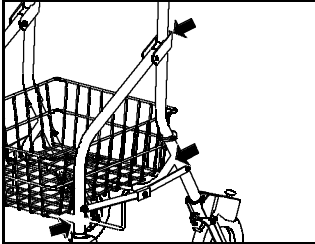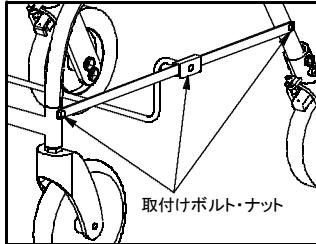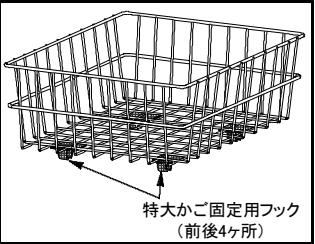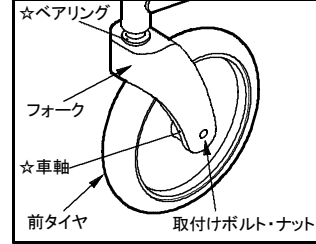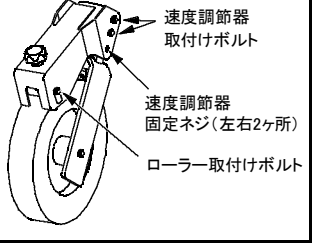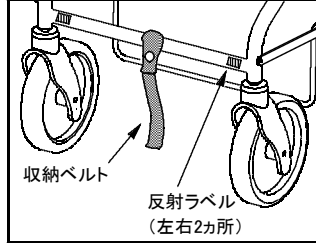
<p>⑤ 本体パイプ(パイプ/各溶接部)</p>  <p>パイプに変形や亀裂がないこと、各溶接部に亀裂など異常がないことをご確認ください。 4輪が平面で接地していない場合、本体パイプが変形している可能性があります。</p> <p>* 各溶接部(図中矢印)を注意してご確認ください。</p>	<p>⑥ 折りたたみステー(取付けボルト・ナット) 左右計6ヶ所</p>  <p>折りたたみステーがスムーズに作動することをご確認ください。折りたたみステーの取付けボルト・ナットにゆるみがないことをご確認ください。</p>
<p>⑦ 特大かご</p>  <p>特大かご本体、特大かご固定用フック(裏面4ヶ所)に変形や破損がないことをご確認ください。</p> <p>特大かご固定用フック (前後4ヶ所)</p>	<p>⑧ 前タイヤ・フォーク(取付けボルト・ナット) 左右2ヶ所</p>  <p>☆ベアリング フォーク ☆車軸 前タイヤ 取付けボルト・ナット</p> <p>タイヤにすり減りがないこと、滑らかに回転すること、フォークに変形や破損がないこと、取付けボルト・ナットにゆるみがないことをご確認ください。</p>
<p>⑨ 速度調節器</p>  <p>速度調節器取付けボルト 速度調節器固定ネジ(左右2ヶ所) ローラー取付けボルト</p> <p>速度調節器に変形や破損がないことをご確認ください。 速度調節器取付けボルト、速度調節器固定ネジにゆるみがないことをご確認ください。 また、ローラー取付けボルトを強く締めすぎないでください。</p> <p>* ローラー取付けボルトを強く締めすぎると、速度調節器が変形し正常に作動しなくなる原因になります。</p>	<p>⑩ 収納ベルト ⑪ 反射ラベル</p>  <p>収納ベルト 反射ラベル(左右2ヶ所)</p> <p>収納ベルトにやぶれやほつれがないことをご確認ください。 反射ラベルがはがれていないことをご確認ください。</p>

【基本仕様】

品名: セーフティーアーム ロレータキャリーUタイプ

品番	使用時サイズ	重量	タイヤサイズ	材質	最大使用者体重
RSCU2	<ul style="list-style-type: none"> 幅: 48cm 奥行: 64cm 全高: 82.5~102.5cm (9段階調節) 	セパレートタイプ 8.5kg	前タイヤ: 8インチ (約20cm) 後タイヤ: 6インチ (約15cm)	本体: アルミ(一部スチール) ハンドルバー: アルミ (握り手部: ウレタン) タイヤ: 合成ゴム セパレートアームレスト: ウレタン 大型アームレスト: ウレタン	100kg (特大かごの積載物重量を含む)
		大型アームレストタイプ 9kg			最大積載量(特大かご)
		15kg			

【安全に製品をご使用いただくために・・・】

《レンタル事業者様へ》

- 「イーストアイ・セーフティーアーム ロレータキャリーUタイプ」をレンタル品としてお取扱いいただきまして、誠にありがとうございます。歩行車をレンタルされる際には、使用者に、歩行車の使用条件、使用方法、取扱い上の警告・注意事項など、この取扱説明書の内容について十分説明していただくようお願いいたします。
また、実際に使用される場所をご確認いただき、周辺に障害物などの危険(例:家具、敷居、敷物など)がある場合、使用者に対して、「使用環境の整備」と「事故防止の対策」などの提案をお願いいたします。
この説明書の内容をご説明いただいた後、必ず下記『アフターサービスのお問合せ先』の各事項を記入の上、商品と一緒に使用者へお渡しください。
- ご使用前に専門家(医師、理学療法士、介護福祉士、ケアマネージャーなど)にご相談ください。長期にわたってレンタルされる場合は使用者の症状が変わる場合があります。定期的に使用者にとってこの用具が正しく、安全に使用することが可能かどうか、製品の状態、使用方法や使用状況などをご確認の上、再度、用具(歩行器、多点杖、歩行車など)の選定の検討や正しい使用方法のご説明をお願いいたします。
- 定期的に使用者宅を訪問の際に、歩行車の状態を『お手入れの際のチェックポイント:18～19項』に基づきご確認ください。メンテナンスをおこなってください。製品は外部から見て損傷がないように見えてもご使用とともに金属疲労、紫外線などによる樹脂の劣化・退色、ゴムの摩耗や硬化などの経年劣化が進み、強度不足など総合的に製品の安全性に問題となる場合があります。点検後に異常が見られる場合は、即時に使用を中止して製品の回収をしていただき、下記『製品についてのお問合せ先』までお問合せください。メンテナンス不良のまま製品の使用を続けると製品の破損や転倒など思わぬ事故の原因になります。定期的にメンテナンスをお願いいたします。
- 弊社では定期的に取扱説明書を改訂しております。商品をご購入後、1年以上を経過して再レンタルなどの場合には、ホームページから介護保険貸与対象福祉用具の「取扱説明書」の最新版をダウンロードしてご利用ください。
(ホームページURL <http://www.easti.co.jp>)

《ご利用者様、介護される方へ》

- この度は「イーストアイ・セーフティーアーム ロレータキャリーUタイプ」をご使用いただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくための警告・注意事項や使用方法、お手入れの際のチェックポイントや点検方法などが記載してあります。レンタル開始時に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、不明な点がございましたら、貸与を受けられているレンタル事業者までお問合せください。ご使用の間に、製品に破損や変形などの異常が見られる場合は即時に使用を中止して、『アフターサービスのお問合せ先:下記』または発売元までお問合せください。

『アフターサービスのお問合せ先』

製品名(品番)	セーフティーアーム ロレータキャリーUタイプ (品番:RSCU2)
レンタル開始日	年 月 日
会社名	(住所/電話番号をご記入ください)

* 商品に異常が見られる場合はすぐに使用を中止し上記レンタル事業者に連絡してください。

* 無断転載・複写を禁じます。

* 説明の都合上、実際の製品に対し、全てのイラストは簡略化しています。

* 「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。

* 製品を譲渡される場合は、必ず合わせて本説明書もお渡しください。

* 廃棄の際には、居住地の自治体の指示に従い処分・廃棄してください。



＜製品についてのお問合せ先＞

株式会社イーストアイ(発売元)

〒123-0864

東京都足立区鹿浜1-4-14

TEL 03(3897)9393 / FAX 03(3897)9535

[rscu2_181221_dl]