

トイレの手すり 折りたたみタイプ

介護保険適用
賃貸
レンタル対象

介護保険適用
住
住宅改修対象

かんたん
組立
工具不要

立ち上がり時に力がかかりやすい手すり形状です。
箱から出して組立1分。すぐに使える便利な手すり。工事・工具不要！撤去もかんたんです。




温水洗浄
便座付き
トイレにも
設置


手すりの高さはプッシュボタンで3段階にかんたん調節できます。



上から見た図

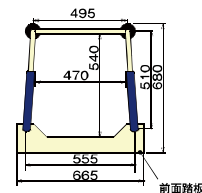

横から見た図

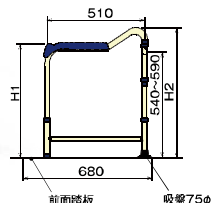

手すりは3段階調節可

高さ	H1	H2
上段	625	730
中段	625	705
下段	600	680

[単位:mm]

¥19,000 + 税

品番: MW50 重量: 4.1kg
収納時サイズ: W58×D10×H68cm



参考取付
所要時間
1分

※便器の形状によって補助ベルトが取り付けできない場合があります。



1 手前の手すりパイプを右に開きます。

2 後ろの手すりパイプを手前側に開きます。



3 この状態で手すりパイプがロック。

4 前面踏板的のシリンダーに差し込みます。

5 補助ベルトをしめて完成です。

手すり高さ **3段階調節**

脚先ゴム **吸盤タイプ**

コンパクト収納 **薄型折りたたみ**

前面踏板 **滑りにくいゴムマット付**

商品名	品番	希望小売価格	TAIS
トイレの手すり 折りたたみタイプ	MW50	¥19,000 + 税	00465000030 (4)

[セット内容(材質)] 本体フレーム(アルミパイプ、背パイプ: スチール、吸盤: 合成ゴム、グリップ: ポリエチレン、バックル付補助ベルト)、前面踏板×1(ステンレス粉体塗装、手すり取付部: アルミ)、床固定用ビス×4、吸盤用補助板(樹脂)×2、六角レンチ

介護保険 レンタル業者様へ おすすめ情報です。

トイレの手すりの取り付けで苦勞されていた皆様へ、トイレの手すり折りたたみタイプ(MW50)は組立の苦勞などを軽減します。

1 持ち運びもラク!
アルミ製だから軽量。
セット・撤去時の持ち運びもかんたん。

2 組み立てもラク!
手すりパイプを広げて、
前面踏板上に差し込むだけ。

3 撤去もラク!
組み立ての逆順で
撤去もかんたんです。

4 メンテナンスもラク!
グリップ・前面踏板や組立ビスは
掃除やお手入れが楽な材質使用。

5 保管もラク!
薄型に折りたたみができるので、
省スペースで保管ができます。

6 部品管理もラク!
部品は大きく分けて2つ。
パーツの紛失を防ぎ管理も楽。