




セーフティーアーム® ウォーカーMタイプ

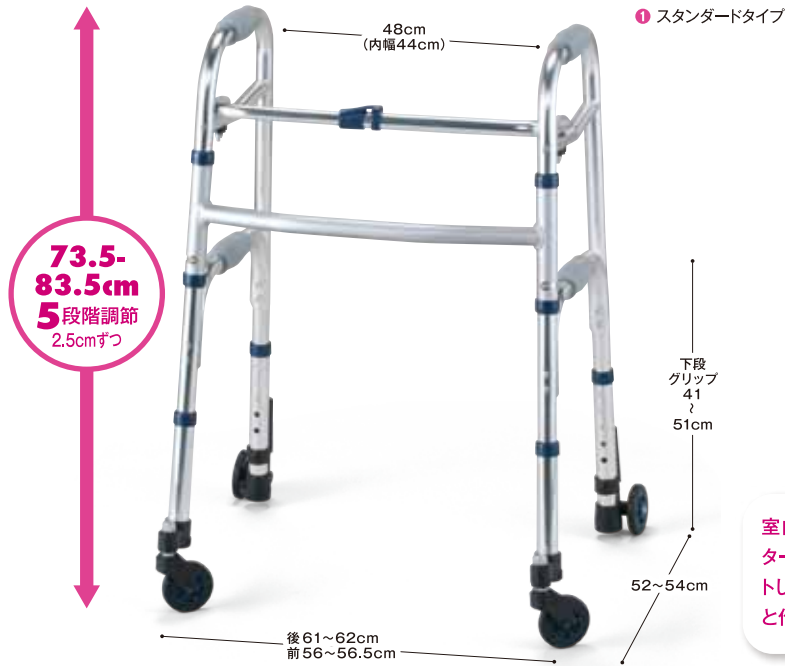

3インチプラスチックキャスターの室内専用タイプ。
持ち運びにおすすめ。



スタンダード	ハイタイプ	
ミニタイプ	SSタイプ	
固定タイプ	スイングキャスター	ストレートキャスター
屋外	屋内	
アクセサリ付け替えOK	ゴムキャップブラック	
グリップ交換OK	グリップトレイ取り付けOK	
グリップ高さ5段階調節	コンパクト収納 折りたたみ	

交換用パーツ P.20 をご参照ください。

室内専用タイプの歩行器。前輪はスイングキャスターの4輪歩行器なので、スムーズな歩行をサポートします。もちろん、後脚には、上から荷重をかけるように作動するストッパーが付いているので安心です。



軽量なので、持ち運びにも便利な歩行器


ご家庭内では、施設などと違い、住環境の整備をして段差をなくすように努めても、どうしても敷居やドアレールなどのちょっとした段差まで解消することが難しいと思います。Mタイプなら、3インチプラスチックキャスターを使用しているので、4輪歩行器のLタイプ、Gタイプと比べて軽量。段差を超える際に持ち上げやすいので、持ち運びなどの動作が多い場合にもおすすめです。

1 スタンダードタイプ
¥28,500 (非課税)
品番:SAWMR 重量:3.5kg
収納時サイズ:W63×D11×H76.5cm

2 ハイタイプ
¥28,500 (非課税)
品番:SAWMHR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64.5×D12×H85cm

3 ミニタイプ
¥28,500 (非課税)
品番:SAWMSR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D10×H68cm
※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

4 SSタイプ
¥27,500 (非課税)
品番:SAWMSSR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W52×D12.5×H68cm
※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

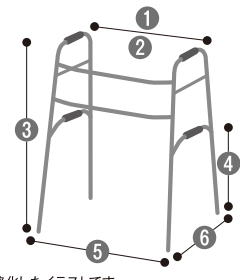


※簡略化したイラストです。

■使用方法

●2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- 1 歩行器左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

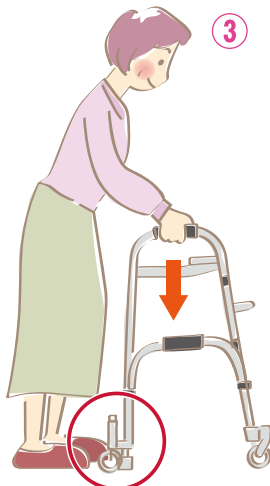

品番	1 グリップ全幅	2 グリップ内幅	3 高さ	4 下段グリップ高さ	5 全幅		6 奥行き
					前側	後側	
2 ハイタイプ	48	44	82.5~92.5	44~54	57.5~58.5	63~64	52~54
3 ミニタイプ	44	40	66~76	39~49	54~54.5	59~60	50~52
4 SSタイプ	37	33	66~76	39~49	46~47	51~52	46~48

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
1	セーフティーアームウォーカー Mタイプ	SAWMR	¥28,500 (非課税)	4515914-200775	00465-000039	④
2	セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ	SAWMHR		4515914-302707	00465-000048	④
3	セーフティーアームウォーカーミニ Mタイプ	SAWMSR		4515914-200874	00465-000041	
4	セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ	SAWMSSR	¥27,500 (非課税)	4515914-200898	00465-000045	④

[材質] 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック(3インチ) ※固定式歩行器用の脚先ハイブセットは付属されておりません。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。