




セーフティーアーム® ウォーカーLタイプ

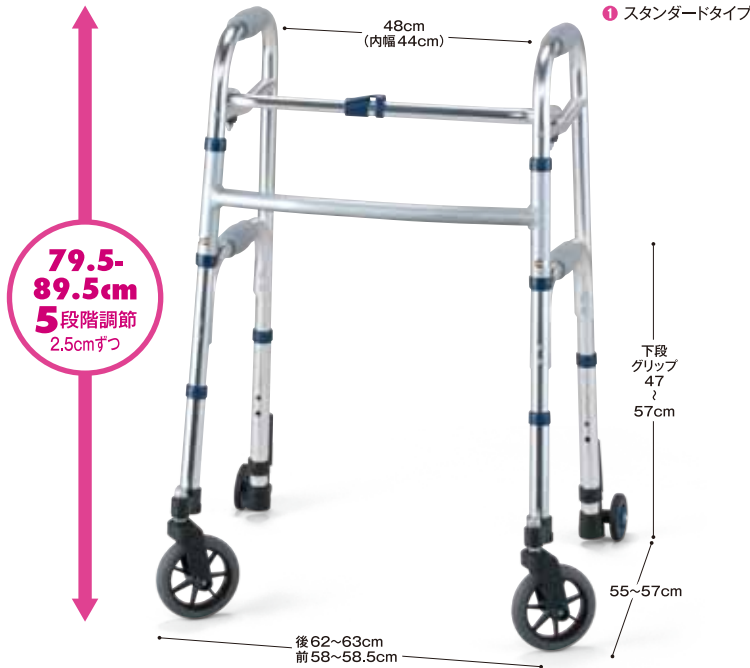

5インチ・大型ゴムスイングキャスターと
3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。



スタンダード	ハイタイプ	
ミニタイプ	SSタイプ	
固定タイプ	スイングキャスター	ストレートキャスター
屋外	屋内	
アクセサリ付け替えOK	ゴムキャップブラック	
グリップ交換OK	クリップトレイ取り付けOK	
グリップ高さ5段階調節	コンパクト収納 折りたたみ	

交換用パーツ P.20 をご参照ください。

前輪は、5インチの大型ゴムタイヤを使用。スイングキャスターなので、小回りがきき、よりスムーズな歩行をサポートします。タイヤが大きい分、グリップの高さがあるので、背の高い方にもおすすめのタイプ。Gタイプと同様、室内屋外用タイプです。



1 スタンダードタイプ
¥29,500 (非課税)
品番:SAWLR 重量:3.8kg
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

2 ハイタイプ
¥29,500 (非課税)
品番:SAWLHR 重量:4.0kg
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

3 ミニタイプ
¥29,500 (非課税)
品番:SAWLSR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm


屋外・屋内両用タイプで、持ち運びにも便利

Lタイプは、Gタイプと同様に4輪歩行器なので、スムーズな歩行をサポートします。また、施設や病院内などのバリアフリー環境でも、エレベーターに溝などがあり、歩行器を進めるのが難しい場合があります。Lタイプであれば、溝などにはまりにくく、室内のちょっとした段差もクリアしやすい歩行器です。また、屋外でも使用できる歩行器で、少しでも軽いものをご希望の場合は、Gタイプよりも軽量のLタイプがお勧めです。

■使用方法

●2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- 1 歩行器左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

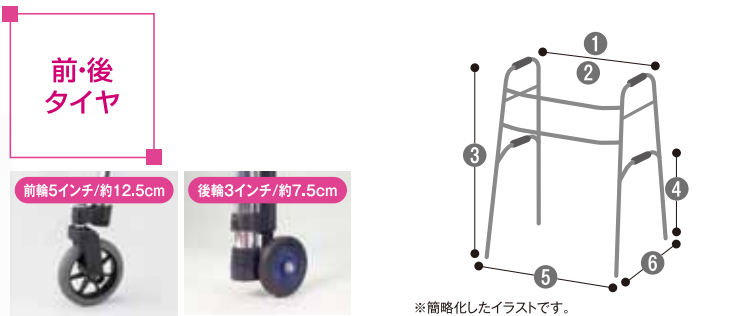

品番	1 グリップ全幅	2 グリップ内幅	3 高さ	4 下段グリップ高さ	5 全幅		6 奥行き
					前側	後側	
2 ハイタイプ	48	44	88.5~98.5	50~60	59.5~60	63.5~64.5	55~57
3 ミニタイプ	44	40	72~82	44.5~54.5	56~56.5	60~61	53~55

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
1	セーフティーアームウォーカーLタイプ	SAWLR	¥29,500 (非課税)	4515914-200973	00465-000017	④
2	セーフティーアームウォーカーハイタイプ	SAWLHR		4515914-302806	00465-000100	④
3	セーフティーアームウォーカーミニタイプ	SAWLSR		4515914-201079	00465-000054	④

[材質] 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム(5インチ) 後脚:プラスチック(3インチ)※固定式歩行器用の脚先ハイブセットは付属されていません。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。