



# セーフティーアーム®



セーフティーアーム® は、スタンダードの固定式歩行器です。「コの字型」で歩行をサポート。プッシュボタンでフレームを「ハの字型」に広げれば、座位保持や立ち上がり用の手すりとしてサポートします。



## 1 スタンダードタイプ

¥18,500 (非課税)

品番: SAR-C 重量: 2.7kg  
収納時サイズ: W56×D10×H71.5cm



## 2 ハイタイプ

¥18,500 (非課税)

品番: SAHR 重量: 2.9kg  
収納時サイズ: W57×D11×H81cm

「コの字型」で歩行、  
「ハの字型」で手すりとして  
大活躍

歩行時の「コの字型」から更にフレームを広げると「ハの字型」となり、手すりとしてもご使用できます。  
トイレの前に置き、立ち上がり用・車いすからベッドへの移乗用・床から立ち上がり用の手すりとしても便利な歩行器です。

スタンダード	ハイタイプ	
ミニタイプ	SSタイプ	
固定タイプ	スイングキャスター	ストレートキャスター
屋外	屋内	
アクセサリ付け替えOK	ゴムキャップグレー	
グリップ交換OK	グリップトレイ取り付けOK	
グリップ高さ5段階調節	コンパクト収納 薄型 折りたたみ	


交換用パーツ P.20 をご参照ください。

固定式歩行器で歩行すると歩行器を持ち上げる動作によって、脚だけでなく、手のリハビリにもなります。



### ■使用方法

- 歩行器の基本です。
- 2~3の動作を繰り返すことで歩行をサポート。

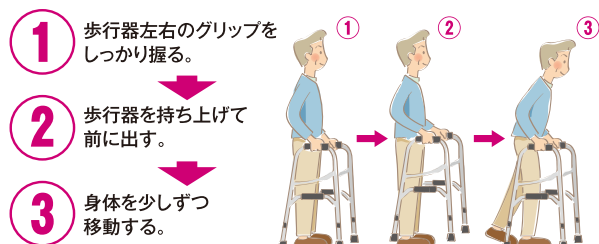

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
1	セーフティーアーム	SAR-C	¥18,500 (非課税)	4515914-302301	00465-000016	④
2	セーフティーアームハイタイプ	SAHR		4515914-300611	00465-000097	④

【材質】本体: アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ: 合成ゴム

※オプションのグリップトレイは取付できません。歩行器を持ち上げると、荷物が落ちるおそれがあります。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。