

スタンダードタイプ

■使用方法

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- 1 グリップとブレーキレバーを握り、前腕をアームレストにのせる。
- 2 ブレーキをゆるめ歩行車を前に出す。
- 3 ブレーキレバーをしっかり握り、ブレーキを作動させる。(歩行車固定)
- 4 身体を少しずつ移動する。



2 UXタイプウォーカー

¥37,000 (非課税)

品番: SAUX 重量: 5.8kg 収納時サイズ: W61×D25×H91cm

ご利用者をサポートするすぐれた安心機能がいっぱいです。

アームレスト

クッション性にすぐれた幅広のアームレストなので、前腕をのせることでしっかりお身体を支えることができます。



縦型ハンドル

ハンドルを縦型にし、前方へ出し、更にひねりを加えて、握りやすさを追求しました。楽な姿勢で握りやすく、ブレーキ操作もしやすい縦型ハンドルです。




スリムサイズ

スリムサイズなので、ご家庭内など、限られたスペースでのご使用に特におすすめ。



ハンドルブレーキ

自分のペースでブレーキ操作しながら歩行をサポート。ブレーキレバーを前に押し出してロックするパーキングブレーキ付き。

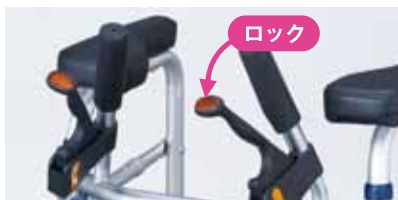

立ち上がり用グリップ

床からの立ち上がりの際に便利。



コンパクト収納

薄型に折りたたみができるので、収納・持ち運び・車への積み込みなどコンパクトで便利。



ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボタンと輪ネジのダブルでロック。しっかり固定されるので安心です。



前・後タイヤ

前タイヤはシングキャストで小回りがききスムーズな歩行をサポートします。



セーフティーアームシリーズ専用クリップトレイ

お客様の「あつらいいな」のお声をもとにセーフティーアーム(タイヤ付きのみ)にかんたんに取付・取外し、小物やお飲み物を持ち運ぶことができる便利なクリップトレイです。



セーフティーアームシリーズ専用クリップトレイ(SAVT)¥2,000+税

※固定脚タイプは、持ち上げると荷物が落ちるおそれがありますので取り付けできません。

歩行器を使用すると左右の手が塞がってしまいます。ちょっとした小物の持ち運びに便利なクリップトレイです。お飲み物や携帯電話・お菓子・薬などを持ち運びができます。



※セーフティーアーム® UXタイプウォーカーシリーズには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリの取付・共有はできません。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。