

ご利用者様をサポートするすぐれた安心機能がいっぱいです。

アームレスト

クッション性にすぐれた幅広いアームレスト。前腕をのせることでお身体を支えることができます。



ハンドルブレーキ

自分のベースでブレーキ操作しながら歩行をサポート。ブレーキレバーを前に押し出してロックするキングブレーキ付き。



立ち上がり用グリップ

床からの立ち上がりの際に便利。



コンパクト収納

薄型に折りたたみができるので、収納・持ち運び・車への積み込みなどコンパクトで便利。

※センターパッド装着時には折りたたむことはできません。



ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボタンと輪ネジのダブルでロック。しっかり固定されるので、安心です。



前・後タイヤ

前タイヤはスイングキャスターで小回りがきくスムーズな歩行をサポートします。

前輪7インチ/約18cm

後輪5インチ/約12.5cm



4点ステッキSタイプ

1本杖では歩行が不安な方におすすめのステッキ。

介護保険適用
貸
レンタル対象



① マーブルグリーン

¥7,500 (非課税)
品番:FS4-MG 重量:750g

② マーブルレッド

¥7,500 (非課税)
品番:FS4-MR 重量:750g

③ ブラック

¥7,000 (非課税)
品番:FS4-B 重量:750g

④ シルバー

¥7,000 (非課税)
品番:FS4-C 重量:750g

■ご使用にあたって…


4点ステッキは脚が4本あり、1本杖より支持面積が広く安定性がありますが、4本脚全てが地面に接地していないとバランスを崩し、転倒するおそれがありますので、十分ご注意の上ご使用ください。

交換用パーツ

4点ステッキ専用交換用脚先ゴムキャップ
Sタイプ(FS4CCS)
… ¥1,400+税/4個セット
※バラ売りはできません。

■使用方法

- 2~5の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。
- ステッキ台座の支柱の狭い方を身体側で使用します。
- プッシュボタンの向きを変えることで左手用・右手用の切り替えができます。

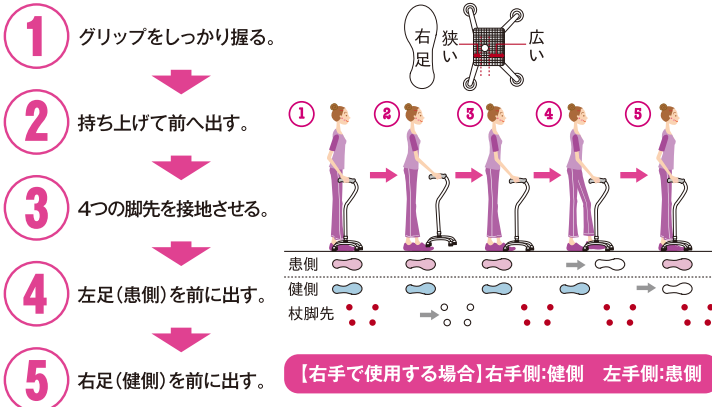

※上図ではステッキの一般的な使用方法(3動作歩行)を説明しています。
※ご使用される方の身体の状態により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

【商品名: 4点ステッキSタイプ】

	カラー	品番	希望小売価格	JAN	TAIS
①	マーブルグリーン	FS4-MG	¥7,500 (非課税)	4515914-200188	00465-000101
②	マーブルレッド	FS4-MR		4515914-200287	00465-000101
③	ブラック	FS4-B	¥7,000 (非課税)	4515914-200751	00465-000020
④	シルバー	FS4-C		4515914-200652	00465-000020

【材質】本体:アルミ(台座はスチール)、握り手:ウレタン

「セーフティーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。