



室内専用



ハンドル・グリップ



4サイズあり



脚先調節



介護保険適用
レンタル対象

セーフティーアーム® ウォーカーCタイプ

4サイズ

- ① スタンダードタイプ
- ③ ミニタイプ
- ② ハイタイプ
- ④ SSタイプ

ストレートキャスターの前輪とストッパーの付いた後脚の室内専用タイプ。
ゆっくり歩行をサポートします。方向転換も自分のペースで。

スタンダードタイプ



高さ調節

71.5~81.5cm 5段階調節 (2.5cmずつ)

車輪サイズ

前輪 **3インチ** (7.5cm)

後脚 **ストッパー**

使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
 - 2 歩行器を前に出す。
 - 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
 - 4 身体を少しずつ移動する。
- 2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



① スタンダードタイプ

¥25,000 (非課税)

品番:SAWCR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W60×D11×H73.5cm

② ハイタイプ

¥25,000 (非課税)

品番:SAWCHR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D11×H82.5cm

③ ミニタイプ

¥25,000 (非課税)

品番:SAWCSR 重量:2.9kg
収納時サイズ:W57×D10×H66cm

④ SSタイプ

¥24,000 (非課税)

品番:SAWCSSR 重量:2.7kg
収納時サイズ:W49×D10.5×H65.5cm

セーフティーアームシリーズ
共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.2-4・P.19・P.21を参照ください。)



セパレートグリップ



荷重ブレーキ



ストレートキャスター



2段グリップ




コンパクト収納



クリップトレイ取り付け

サイズ表	①グリップ全幅	②グリップ内幅	③高さ	使用者身長(目安)	④下段グリップ高さ	⑤全幅	⑥奥行き
①スタンダードタイプ	48cm	44cm	71.5~81.5cm	140~160cm	39~49cm	56~57cm	49~51cm
②ハイタイプ	48cm	44cm	80.5~90.5cm	155~180cm	42~52cm	57.5~58.5cm	49~51cm
③ミニタイプ	44cm	40cm	64~74cm	125~145cm	36.5~46.5cm	54~55cm	46~48cm
④SSタイプ	37cm	33cm	64~74cm	125~145cm	36.5~46.5cm	46~47cm	42~44cm

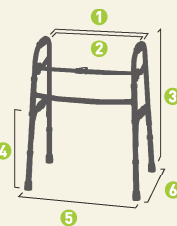

※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
①	セーフティーアームウォーカー Cタイプ	SAWCR	¥25,000(非課税)	4515914-200577	00465-000025	④
②	セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ	SAWCHR		4515914-302608	00465-000047	④
③	セーフティーアームウォーカーミニ Cタイプ	SAWCSR	¥24,000(非課税)	4515914-200676	00465-000040	④
④	セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ	SAWCSSR		4515914-200799	00465-000044	

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。