



室内専用



ハンドル・グリップ



4サイズあり



脚先調節

貸

介護保険適用
レンタル対象

セーフティーアーム® ウォーカーMタイプ

4サイズ

- ① スタンダードタイプ
- ② ハイタイプ
- ③ ミニタイプ
- ④ SSタイプ

3インチプラスチックキャスターで軽量です。

そのため、持ち上げやすいので、ご家庭内のちょっとした段差を越える際の持ち運び動作に便利です。

スタンダードタイプ



高さ調節

73.5~83.5cm 5段階調節 (2.5cmずつ)

車輪サイズ

前輪 3インチ (7.5cm)

後輪 3インチ (7.5cm)

使用方法

- 1 左右のグリップをしっかりと握る。
 - 2 歩行器を前に出す。
 - 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
 - 4 身体を少しずつ移動する。
- 2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



① スタンダードタイプ

¥28,500 (非課税)

品番:SAWMR 重量:3.5kg
収納時サイズ:W63×D11×H76.5cm

② ハイタイプ

¥28,500 (非課税)

品番:SAWMHR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64.5×D12×H85cm

③ ミニタイプ

¥28,500 (非課税)

品番:SAWMSR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D10×H68cm

④ SSタイプ

¥27,500 (非課税)

品番:SAWMSSR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W52×D12.5×H68cm

セーフティーアームシリーズ
共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.2-4・P.19・P.21を参照ください。)



セバレットグリップ



荷重ブレーキ



スイングキャスター



2段階グリップ




コンパクト収納



クリップトレイ取り付け

サイズ表	①グリップ全幅	②グリップ内幅	③高さ	使用者身長 (目安)	④下段グリップ 高さ	⑤全幅		⑥奥行き
						前側	後側	
①スタンダードタイプ	48cm	44cm	73.5~83.5cm	140~165cm	41~51cm	56~56.5cm	61~62cm	52~54cm
②ハイタイプ	48cm	44cm	82.5~92.5cm	160~185cm	44~54cm	57.5~58.5cm	63~64cm	52~54cm
③ミニタイプ	44cm	40cm	66~76cm	130~150cm	39~49cm	54~54.5cm	59~60cm	50~52cm
④SSタイプ	37cm	33cm	66~76cm	130~150cm	39~49cm	46~47cm	51~52cm	46~48cm

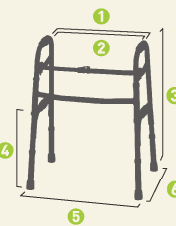

※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
①	セーフティーアームウォーカー Mタイプ	SAWMR	¥28,500(非課税)	4515914-200775	00465-000039	④
②	セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ	SAWMHR		4515914-302707	00465-000048	④
③	セーフティーアームウォーカーミニ Mタイプ	SAWMSR		4515914-200874	00465-000041	④
④	セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ	SAWMSSR	¥27,500(非課税)	4515914-200898	00465-000045	

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。