



室内・
屋外用



ハンドル・
グリップ



3サイズ
あり



脚先調節



介護保険適用
レンタル対象

セーフティーアーム®ウォーカーGタイプ 4サイズ ①スタンダードタイプ ③ミニタイプ ②ハイタイプ

4インチキャスターの6輪タイプ。キャスター幅が広いので溝などにはまりにくく、さらにツインゴムキャスター付きストッパーで、地面にしっかり接地するので、安定性にすぐれています。屋外での使用にもおすすめです。

スタンダードタイプ



高さ
調節

79.5~89.5cm 5段階調節
(2.5cmずつ)

車輪
サイズ

前輪 **4インチ**
(10cm)

後輪 **4インチ**
(10cm)

使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。
2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



①スタンダードタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGR 重量:4.8kg
収納時サイズ:W64×D13.5×H82.5cm

②ハイタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGHR 重量:5kg
収納時サイズ:W66×D13.5×H91.5cm

③ミニタイプ

¥31,500 (非課税)

品番:SAWGSR 重量:4.5kg
収納時サイズ:W62×D13.5×H75cm

セーフティーアームシリーズ
共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.2・4・P.19・P.21を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重ブレーキ



スイング
キャスター



2段階グリップ




コンパクト
収納



クリップトレイ
取り付け

| サイズ表 | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高さ | 使用者身長 (目安) | ④下段グリップ 高さ | ⑤全幅 | | ⑥奥行き |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | 前側 | 後側 | |
| ①スタンダードタイプ | 48cm | 44cm | 79.5~89.5cm | 155~175cm | 47~57cm | 60~61cm | 67~68cm | 57~59cm |
| ②ハイタイプ | 48cm | 44cm | 88.5~98.5cm | 170~190cm | 50~60cm | 61.5~62.5cm | 68.5~69.5cm | 57~59cm |
| ③ミニタイプ | 44cm | 40cm | 72~82cm | 140~165cm | 44.5~54.5cm | 57.5~58.5cm | 64.5~65.5cm | 55~57cm |

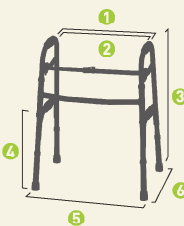

| | 商品名 | 品番 | 希望小売価格 | JAN | TAIS | |
|---|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Gタイプ | SAWGR | ¥31,500(非課税) | 4515914-201178 | 00465-000038 | ③ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ | SAWGHR | | 4515914-302905 | 00465-000046 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Gタイプ | SAWGSR | | 4515914-201277 | 00465-000027 | ③ |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。