



室内・
屋外用



ハンドル・
グリップ



サイズ
あり



脚先調節

貸 介護保険適用
レンタル対象

セーフティーアーム®ウォーカーLタイプ

④サイズ

①スタンダードタイプ ③ミニタイプ
②ハイタイプ

5インチ・ゴムスイングキャスターと3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。大型タイヤで溝にはまりにくく、エレベーターなどがある施設や病院での使用にも便利。また、屋外でも使用できる歩行器で少しでも軽いものをご希望の場合におすすめです。

スタンダードタイプ



高さ
調節

79.5~89.5cm 5段階調節
(2.5cmずつ)

車輪
サイズ

前輪 5インチ
(12.5cm)

後輪 3インチ
(7.5cm)

使用方法

- 1 左右のグリップを
しっかり握る。
 - 2 歩行器を前に出す。
 - 3 歩行器に体重をかけて
ストッパーを作動させる。
 - 4 身体を少しずつ移動する。
- 2~4の動作を繰り返すことで
歩行をサポートします。



①スタンダードタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLR 重量:3.8kg
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

②ハイタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLHR 重量:4kg
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

③ミニタイプ

¥29,500 (非課税)

品番:SAWLSR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm

セーフティーアームシリーズ
共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.2-4・P.19・P.21を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重ブレーキ



スイング
キャスター



2段階グリップ




コンパクト
収納



クリップトレイ
取り付け

サイズ表	①グリップ全幅	②グリップ内幅	③高さ	使用者身長 (目安)	④下段グリップ 高さ	⑤全幅		⑥奥行き
						前側	後側	
①スタンダードタイプ	48cm	44cm	79.5~89.5cm	155~175cm	47~57cm	58~58.5cm	62~63cm	55~57cm
②ハイタイプ	48cm	44cm	88.5~98.5cm	170~190cm	50~60cm	59.5~60cm	63.5~64.5cm	55~57cm
③ミニタイプ	44cm	40cm	72~82cm	140~165cm	44.5~54.5cm	56~56.5cm	60~61cm	53~55cm

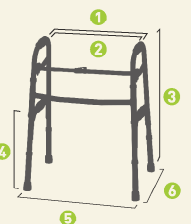

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
①	セーフティーアームウォーカー Lタイプ	SAWLR	¥29,500(非課税)	4515914-200973	00465-000017	④
②	セーフティーアームウォーカーハイ Lタイプ	SAWLHR		4515914-302806	00465-000100	④
③	セーフティーアームウォーカーミニ Lタイプ	SAWLSR		4515914-201079	00465-000054	④

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム、後輪:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。