











歩行器を選ぶチェックポイント →次頁の特徴の詳細も併せてご覧ください

チェック項目	備 考	分 類 ※各歩行器にこのマークが記載されています
<p>チェック 1 使用場所</p>	<p>歩行器にはタイヤの材質や歩行器のサイズなどによって、「室内専用タイプ」と「室内・屋外両用タイプ」があります。室内で使用するのか、屋外で使用するのかにより選択できる歩行器が変わりますので、使用する場所を確認してください。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>室内専用</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>室内・屋外両用</p> </div> </div>
<p>チェック 2 使用目的</p>	<p>リハビリ用・お買い物用・通院用・施設での使用・家事サポートなど目的により歩行器を選択できます。「かご付き」・「バッグ付き」・「座面付き」など、ご利用者様の使用目的に合う歩行器を選択してください。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>かご付き</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>バッグ付き</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>座面付き</p> </div> </div>
<p>チェック 3 お身体の状態</p>	<p>歩行器は手でグリップやハンドルを握り使用する「ハンドル・グリップタイプ」と、手と前腕部で身体を支える「アームレストタイプ」の2つに分かれます。手の変形や痛みなどの有無に応じて、ご利用者様の使いやすいタイプを選択しましょう。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ハンドル・グリップ</p> <p>ハンドル・グリップを握り、肘が軽く曲がる位(肘角度約30～40度)の高さを目安にしてください。</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>アームレスト</p> <p>ハンドルを握り、アームレストに前腕部をのせた状態で肘が90度位になる高さを目安にしてください。</p>  </div> </div>
<p>チェック 4 歩行器のサイズ</p>	<p>歩行器には高さ調節機能がありますが、サイズバリエーションのある歩行器もあります。まずは、お身体の状態に合うサイズの歩行器を選択します。また、ご家庭内で使用する際、限られたスペースで使用するので歩行器の幅もご確認ください。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>サイズあり</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コンパクト</p> </div> </div>
<p>チェック 5 高さ調節</p>	<p>高さ調節、は脚先パイプをスライドさせプッシュボタンで固定する「脚先調節タイプ」と、ハンドルパイプをスライドさせて高さ調節ノブで固定する「ハンドル調節タイプ」があります。使いやすい高さに調節してください。</p> <p><small>高さが合わない歩行器を使用すると歩行の妨げになり、歩行器へ上手く力がかけられず、手首や肘などの負担や腰痛などの原因になる、また低すぎると円背が進むなどの原因になることもあります。また、屋外で使用する場合、靴を履いた状態で高さ調節してくださいね♪</small></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>脚先調節タイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ハンドル調節タイプ</p> </div> </div>

→次頁の特徴の詳細をご覧ください

カタログ表示のポイント

**歩行器の
使用者身長目安**

各歩行器に使用者身長目安を記載しました。参考に歩行器を選択してください。

※あくまでも目安としてください。ご利用者様の身体状況や姿勢、円背の有無、使用環境、履き物などにより、使いやすい高さは異なります。専門家にご相談の上、お身体に合った使いやすい高さでご使用ください。

ピクト表記

歩行器を選ぶチェックポイントと特徴を各商品ページにマークで記載しました。P.2-4と併せてお読みください。